



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Dung dịch vệ sinh mũi Agera

1. Thành phần:

Hoạt chất: Chiết xuất từ 15 g cây ngũ sắc (Naphazolin, Mometason,...)

Tá dược: Natri borat 90,0mg; Nipagin 11,25mg; Nipasol 3,75mg; Nước cất vừa đủ 15,0ml.

2. Mô tả: Dung dịch trong suốt, có màu sắc và mùi đặc trưng.

3. Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 ml.

4. Chỉ định sử dụng:

Vệ sinh mũi trong trường hợp viêm mũi, viêm xoang, làm sạch vết thương, tạo kháng thể tự nhiên.

Ngoài ra sản phẩm được dùng kết hợp với các thuốc để điều trị bệnh lý khác theo chỉ định của bác sĩ.

5. Chống chỉ định:

Không sử dụng cho người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

6. Cách dùng:

Theo chỉ định của bác sĩ chuyên môn hoặc dược sĩ.

Mỗi ngày xịt 3 – 4 lần, mỗi lần 1 – 2 nhát vào mỗi bên mũi.

Mở nắp đầu xịt, cầm lọ thẳng đứng xịt vào không khí để loại bỏ màng bảo vệ của đầu xịt. Sau đó hướng đầu xịt vào mũi xịt mạnh, đồng thời hít nhẹ để dung dịch đi sâu vào khoang mũi. Dùng xong đậy nắp đầu xịt.

Chỉ dùng dung dịch trong 30 ngày kể từ khi bắt đầu sử dụng.

7. Cảnh báo và thận trọng:

Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.

Sản phẩm dạng xịt không dùng để uống.

Đậy nắp ngay sau khi dùng.

Đề xa tầm tay trẻ em.

8. Các tác động bất lợi tiềm ẩn:

Chưa có báo cáo.

9. Bảo quản:

Bảo quản sản phẩm nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

10. Hạn dùng:

48 tháng kể từ ngày sản xuất.

11. Nhà sản xuất:

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 ARMEPHACO

Địa chỉ: 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3674 0054- Fax: (024) 3674 0019.