

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY URI-TEX 300

- I. Khởi động máy.
 - Kết nối nguồn AC adapter vào máy.
 - Nhấn nút Power mở máy.
- II. Chạy máy.
 1. Chạy Calibrator máy.
 - Ở chế độ Stanby nhấn phím Esc 2 lần, nhấn số 2 chọn System config
 - Di chuyển mũi tên lên ,xuống chọn white calbration chọn Yes bằng mũi tên trái, phải.
 - Nhấn Esc 2 lần
 - Đặt calbration Strip vào khay sau đó nhấn phím ENT.
 - Máy sẽ calbration và in ra, sau đó nhấn ESC và lấy Strip ra.
 2. Chạy mẫu.

Có 3 chế độ chạy mẫu: General, One by one, Quick.

 - Đăng ký ID từ chế độ Standby nhấn phím ESC 2 lần nhấn số 3 chọn Registration, nhấn phím mũi tên lên xuống chọn ID và nhập số ID bệnh nhân vào từ bàn phím hoặc dùng Barcode quét.Sau đó nhấn ESC 2 lần ra màn hình chính. Chọn chế độ chạy mẫu.
 - a. General.
 - Chế độ này chạy nhiều mẫu thời ,gian ủ mẫu đã được mạch định
 - Ở chế độ Stanby chuyển qua chế độ General bằng mũi tên, nhấn phím ENT cho mẫu vào khay rồi nhấn ENT. Máy sẽ tiến hành đo và in ra.
 - b. One by one.
 - Chế độ này chạy từng test
 - Ở chế độ Stanby dùng phím mũi tên chuyển qua chế độ one by one, cho que vào khay nhấn ENT máy tiến hành đo.
 - c. Quick
 - Chế độ này ủ ở ngoài chạy nhiều mẫu 1 lượt.
 - Ở chế độ Stanby dùng phím mũi tên chuyển qua chế độ Quick, cho que vào, đợi không 1 phút bấm ENT máy tiến hành đo.
- III. Tắt máy.
 - Nhấn nút nguồn phía sau để tắt máy.
 - Lấy khay ra vệ sinh.



Giám Đốc

Dặng Thị Lê Phương