

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TIẾNG VIỆT

**Tên cơ sở đăng ký lưu hành:** Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Đại Dương

**Địa chỉ:** Tầng 2A nhà A2, 250 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Hãng nước sản xuất:** Erba Lachema S.R.O / CH Séc

### TÊN SẢN PHẨM:

Elite H5 CON (Elite H5 Con L , Elite H5 Con N , Elite H5 Con H)

Đóng gói: 3ml

**Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm huyết học**

#### 1/ Mục đích sử dụng:

- Dùng để kiểm tra các thông số xét nghiệm huyết học (L: Mức thấp – N: Mức trung bình – H: Mức cao) trên máy phân tích huyết học Elite 580.

#### 2/ Bảo quản:

- Thuốc thử được sử dụng ổn định theo chỉ dẫn của nhà sản xuất (tài liệu kèm theo sản phẩm)
- Cần phải thay thế sản phẩm khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm vi sinh vật hoặc không ổn định như: *Dung dịch bị vẩn đục hoặc thay đổi màu sắc.*
- Không làm đông lạnh sản phẩm.

#### 3/ Hướng dẫn sử dụng:

- Sử dụng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.
- Sử dụng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.
- Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C.
- Hóa chất sẵn sàng sử dụng.
- Sản phẩm là một chất thử chẩn đoán in vitro bao gồm hồng cầu mô phỏng, các bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng trên máy xét nghiệm huyết học.
- Bỏ dung dịch kiểm tra ra để ở nhiệt độ phòng 15-30°C khoảng 15 phút.
- Lắc đều (không sử dụng máy lắc cơ học) và cho vào đo để kiểm tra các giá trị thấp các thông số huyết học.
- Đóng nắp và bảo quản lạnh ngay (không quá 30 phút ở nhiệt độ phòng) sau khi sử dụng.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi nhân viên phòng xét nghiệm đã qua đào tạo.



**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**

GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thế Việt*