

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TIẾNG VIỆT

Tên cơ sở đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Đại Dương

Địa chỉ: Tầng 2A nhà A2, 250 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng nước sản xuất: Erba Lachema S.R.O / CH Séc

TÊN SẢN PHẨM:

Elite H580 Dil

Đóng gói: 20 L

Hóa chất xét nghiệm huyết học

1/ Mục đích sử dụng:

- Dùng để pha loãng máu và cung cấp một môi trường ổn định để đếm và định lượng các tế bào máu trên máy phân tích huyết học Elite 580.

2/ Bảo quản:

- Thuốc thử được sử dụng ổn định theo chỉ dẫn của nhà sản xuất (tài liệu kèm theo sản phẩm)
- Cần phải thay thế sản phẩm khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm vi sinh vật hoặc không ổn định như: *Dung dịch bị vẩn đục hoặc thay đổi màu sắc.*
- Không làm đông lạnh sản phẩm.

3/ Hướng dẫn sử dụng:

- Cài đặt tham số xét nghiệm huyết học trên máy Elite 580
- Thuốc thử được để ở nhiệt độ phòng.
- Nói lỏng và tháo bỏ nắp trên lọ thuốc thử. Gắn bộ phận đầu hút của thuốc thử vào lọ. Vặn chặt nắp.
- Lắp các thuốc thử khác vào máy theo cách tương tự.
- Mời thuốc thử vào máy.
- Khi cài đặt lô thuốc thử mới, chuẩn lại thiết bị như quy định trong hướng dẫn vận hành.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi nhân viên phòng xét nghiệm đã qua đào tạo.



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Khắc Việt