

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TIẾNG VIỆT

Tên cơ sở đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Đại Dương

Địa chỉ: Tầng 2A nhà A2, 250 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng nước sản xuất: Erba Lachema S.R.O / CH Séc

### TÊN SẢN PHẨM:

Elite H580 Lyse 1

Elite H580 Lyse 2

Elite H580 Lyse 3

Hóa chất kiểm tra thông số xét nghiệm huyết học

#### 1/ Mục đích sử dụng:

- Dùng để phá vỡ hồng cầu (RBC), đếm Hemoglobin và WBC trong xét nghiệm huyết học trên máy Elite 580.

#### 2/ Bảo quản:

- Thuốc thử được sử dụng ổn định theo chỉ dẫn của nhà sản xuất (tài liệu kèm theo sản phẩm)
- Cần phải thay thế sản phẩm khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm vi sinh vật hoặc không ổn định như: *Dung dịch bị vẩn đục hoặc thay đổi màu sắc.*
- Không làm đông lạnh sản phẩm.

#### 3/ Hướng dẫn sử dụng:

- Sử dụng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.
- Bảo quản ở nhiệt độ 15-30°C.
- Hóa chất sẵn sàng sử dụng.
- Tháo nắp, lắp vào ống dẫn hút của máy rồi vặn chặt nắp.
- Khi thay hóa chất với lot khác nhau cần hiệu chuẩn lại để đảm bảo kết quả chính xác.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi nhân viên phòng xét nghiệm đã qua đào tạo.



**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**

GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Lộc Việt*