

Tài liệu hướng dẫn sử dụng
TRYBLUE
(Dung dịch Trypan Blue 0.06% w/v)

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 12 tháng 05 năm 2022

Mô tả

Tryblue là chất nhuộm cần thiết dùng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, được dùng để nhuộm màu bao trước thủy tinh thể và các sợi mạch máu giúp cho bác sĩ có thể nhận biết được bao thủy tinh thể 1 cách rõ ràng.

Thành phần

Trypan blue 0.06 %w/v
Sodium chloride IP 0.85%w/v
Isotonic base q.s

Chỉ định

1. Được sử dụng trong phẫu thuật mắt.
2. Được sử dụng như 1 chất nhuộm màu.

Chống chỉ định

Tryblue được chống chỉ định khi đã đặt IOL ngâm nước vào trong mắt bởi vì chất nhuộm có thể thấm vào IOL.

Cảnh báo và cần trọng

1. Sử dụng riêng rẽ ống bơm và kim tiêm khi tiêm Tryblue (Trypan blue). (Tránh dùng kim tiêm có chất kháng sinh vì nó sẽ làm kết dính Trypan blue).
2. Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng.
3. Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em.
4. Hoàn toàn sử dụng kim tiêm sử dụng 1 lần.
5. Không được dùng để tiêm tĩnh mạch/tiêm bắp.

Phản ứng phụ

1. Tryblue chịu đựng tốt khi đặt IOL vào trong tiền phòng mắt trong quá trình phẫu thuật.
2. Có thể gây phản ứng viêm nhẹ sau hậu phẫu.
3. Phải sử dụng cẩn trọng khi phẫu thuật cho các bệnh nhân bị cao huyết áp.
4. Khi thử nghiệm trên động vật, các ảnh hưởng gây đột biến hoặc quái thai đều được nêu rõ khi tiếp tục hay sử dụng liều cao khi tiêm Trypan blue vào tĩnh mạch hoặc vào màng bụng. Do vậy, không được sử dụng cho phụ nữ có thai.
5. Tryblue làm biến màu nước đựng thủy tinh thể nhân tạo có hydrogen (xem thêm phần chống chỉ định) và bao sau thủy tinh thể và dịch kính nếu bất cẩn trong lúc nhuộm. Việc nhuộm bao sau thủy tinh thể và dịch kính chỉ được thực hiện giới hạn, tối đa là 1 tuần.

Bảo quản

Lưu giữ ở nhiệt độ từ 2°C đến 35°C

Quy cách

Hộp/ 5 lọ, mỗi lọ chứa 1ml thuốc.

Cách sử dụng

Đầu tiên, dùng kim cỡ 26 bơm bóng hơi vào tiền phòng qua vị trí lỗ phụ. Thao tác này sẽ ngăn cản nước làm loãng thuốc nhuộm. Tiếp đến, lấy Tryblue trong lọ bằng ống tiêm. Sau đó, bơm vào tiền phòng giữa phần bóng hơi và bao trước, nghiêng lỗ kim hướng xuống phía dưới để vùng bao trước được nhuộm đều. Nếu một vài nơi không được nhuộm màu thì bơm thêm thuốc nhuộm vào vùng đó để bao trước được nhuộm đầy đủ. Thuốc nhuộm được giữ khoảng 1 phút cho đến khi bao trước được nhuộm hoàn toàn. Bước tiếp theo, bơm chất nhầy đàn hồi vào tiền phòng mắt để giữ tiền phòng cản ra tạo thành van hoàn hảo nhất. Sử dụng tấm bông vô trùng chùi vết mỡ để làm sạch. Bơm chất nhầy đàn hồi vào lỗ phụ để làm mất bóng hơi và Tryblue. Bây giờ ta bắt đầu xé bao bằng kim hoặc kẹp. Ta sẽ nhìn thấy sự tương phản giữa bao trước được nhuộm và phần vô thủy tinh thể. Xé bao liên tục và cuối cùng hoàn chỉnh. Khi xé bao hoàn chỉnh ta có thể nhìn thấy bao trước được nhuộm nằm trong tiền phòng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản xuất

SUNWAYS (INDIA) PVT. LTD.

1002-1003, 10th Floor, Windfall, Sahar Plaza Andheri Kura Road, Andheri (East), Mumbai – 400 059, Maharashtra, India.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



*Giám Đốc
Phạm Bá Cảnh*