

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kính gửi: - Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế);  
- Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh.

**Vật liệu:** Thép không gỉ.

**Mục đích sử dụng:**

Dụng cụ phẫu thuật hỗ trợ bắt vít vào xương cổ chân.

Dụng cụ được sử dụng nhiều lần.

**Hướng dẫn:**

### 1. Quy trình rửa và khử trùng:

Tất cả các dụng cụ phải được kiểm tra trước mỗi ca phẫu thuật và trước khi khử trùng:

Quy trình rửa dụng cụ:

- Rửa sạch dưới vòi nước trong 1 phút 15 giây.
- Ngâm trợ cụ trong dung dịch Enzol (hoặc dung dịch làm sạch enzym tương đương).
- Chà rửa các bề mặt bên trong và bên ngoài bằng bàn chải 5 lần.
- Rửa sạch dưới vòi nước trong 1 phút 15 giây.
- Lặp lại các bước làm sạch ở trên thêm 1 lần nữa.
- Lau khô hoàn toàn.
- Đặt vào khay dụng cụ sạch.

Quy trình khử trùng dụng cụ:

- Khử trùng bằng nồi hấp chân không.
- Dụng cụ và khay bọc kép sử dụng màng bọc khử trùng CSR không dệt.
- Phương pháp hấp: Hơi nước.
- Chu kỳ: Prevac.
- Nhiệt độ: 270 độ F (132 độ C).

### 2. Chỉ dẫn:

- Nếu có bất kỳ biến dạng, sai sót hoặc hư hỏng nào nên thay đổi bằng sản phẩm mới đúng tiêu chuẩn.
- Làm theo chỉ dẫn của bác sĩ phẫu thuật có hiểu biết đầy đủ về hướng dẫn sử dụng.
- Sau khi sử dụng, tháo rời các bộ phận của dụng cụ, khử trùng và làm khô.

### 3. Bảo quản và bảo dưỡng sau khi sử dụng:

- Sau khi sử dụng, tháo rời các bộ phận của dụng cụ, khử trùng và làm khô.
- Bảo quản ở điều kiện phòng.
- Bảo quản nơi khô ráo.
- Tháo rời các bộ phận của dụng cụ và bảo quản chúng.

**Bảo quản:** Giữ trong điều kiện phòng.

**Thông tin:**

Các sản phẩm có thể tái sử dụng có thể bị hao mòn do sử dụng nên cần phải kiểm tra tính toàn vẹn trước mỗi lần sử dụng. Cần thay thế các phụ kiện bị mòn và thay mới.



Đại diện hợp pháp của cơ sở

Trần Văn Nhị  
PHÓ GIÁM ĐỐC