




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HYSOKAT (Dụng cụ thăm dò chức năng tử cung)

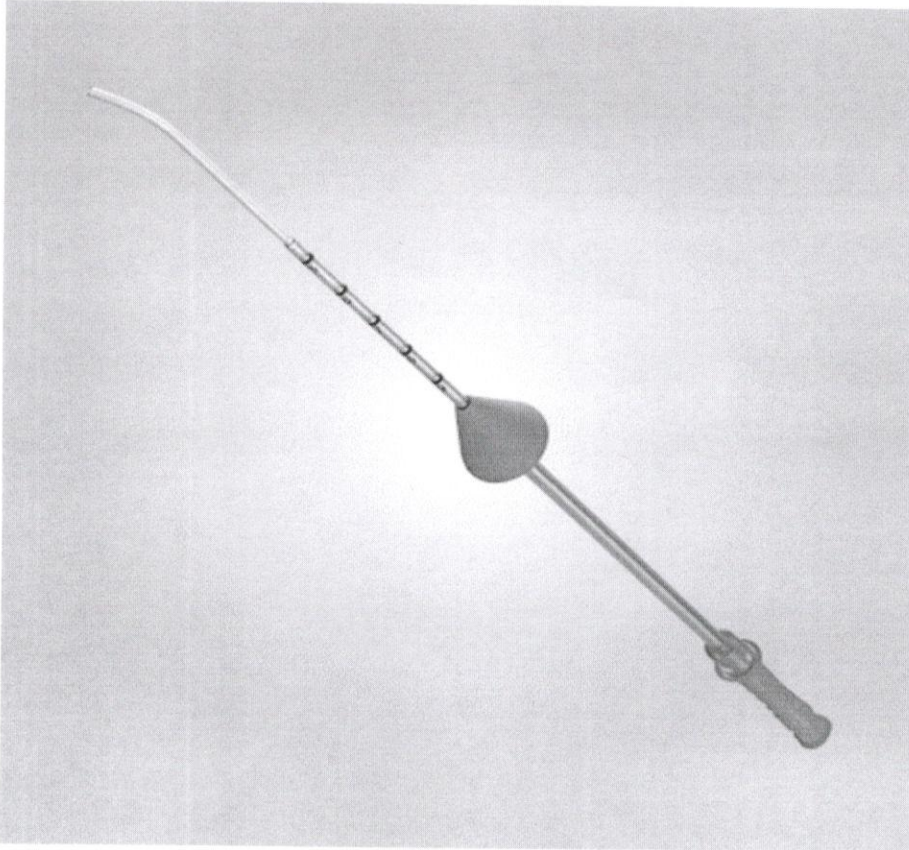

Hướng dẫn sử dụng:

- Đưa HYSOKAT vào tử cung đến độ sâu mong muốn.
- Đẩy lớp vỏ bọc bên ngoài cho đến khi cổ áo đóng lại với hình nón linh hoạt.
- Nhẹ nhàng tiêm chế phẩm đã chọn.
- Nhẹ nhàng tháo thiết bị khi kết thúc quy trình.