



Hyalosan Vaginal Suppositories - Viên dưỡng âm âm đạo Hyalosan

Thành phần: Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Centella Asiatica, Malva Sylvestris, Chamomilla Recutita, Melaleuca Alternifolia, Silica, Hydrogenated C12-18 Triglycerides.

Công dụng:

- Hỗ trợ điều trị, giảm khô âm đạo.
- Ngăn ngừa việc teo màng nhầy và biểu mô âm đạo.

Đối tượng sử dụng:

- Phụ nữ bị khô âm đạo liên quan đến thay đổi nội tiết tố trong tất cả các giai đoạn của phụ nữ, đặc biệt là trong thời kỳ mãn kinh, sau khi chuyển dạ, khi cho con bú, sau hóa trị và xạ trị hoặc phẫu thuật phụ khoa.
- Phụ nữ bị giảm màng nhầy và bị teo âm đạo, thường hay bị ngứa, mẩn đỏ hoặc cảm giác không thoải mái khi giao hợp.

Hướng dẫn sử dụng:

- Rửa tay sạch trước khi sử dụng. Lấy viên đạn ra khỏi vỉ bằng cách xé đầu viên đạn và đưa vào âm đạo càng sâu càng tốt.
- Nằm ngửa khi đặt viên đạn. Nằm ngửa vài phút sau khi đặt vào âm đạo, viên đạn sẽ mềm ra do nhiệt độ cơ thể và bao phủ đều toàn bộ bề mặt niêm mạc âm đạo. Sử dụng lớp lót trong quần lót để bảo vệ nếu cần.
- Thích hợp dùng trước khi đi ngủ.
- Liều dùng: Dùng 1 viên/ ngày trong 10 ngày hoặc theo khuyến cáo của bác sĩ. Trong điều trị khô âm đạo do mãn kinh, dùng 1 viên/ ngày trong 10 - 20 ngày, sau đó dùng lâu dài tuần 2 lần, mỗi lần 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ từ 5°C đến 25°C.

Cảnh báo và thận trọng:

- Sản phẩm chỉ được sử dụng cho âm đạo.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, trong thời kỳ mang thai và khi sử dụng đồng thời các chế phẩm đặt âm đạo khác (bao gồm cả biện pháp tránh thai đặt âm đạo).

- Không sử dụng trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc trong trường hợp tăng tiết âm đạo.
- Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng.
- Không sử dụng khi sản phẩm hết hạn.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên

Số lô SX, ngày SX và hạn sử dụng: Xem trên bao bì thương phẩm.

Nhà sản xuất: Dr. Müller Pharma s.r.o.

Địa chỉ: U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové, Czech Republic

Xuất xứ: Cộng hòa Séc

Chủ sở hữu số công bố/ Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH HEALTHSK

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Zodiac, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà phân phối: Công ty TNHH Trust Me

Địa chỉ: Số 36, Ngách 157/16, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Số công bố:

