

Hà Nội, Ngày 03 tháng 05 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

KHẨU TRANG Y TẾ ĐẠT PHÁT - KF94

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng hiệu quả khi tập trung đông người, lưu thông trên đường, môi trường bụi bẩn, độc hại

- mở nếp gấp một góc 120 độ
- điều chỉnh khẩu trang để mũi, cằm được che phủ hoàn toàn, kéo dây vòng qua tai
- tạo nếp xung quanh sống mũi
- kiểm tra có khe hở hay không, điều chỉnh khẩu trang cho vừa với khuôn mặt

CHÚ Ý – CẢNH BÁO

- không sử dụng khi sản phẩm bị hết hạn, bao bì không còn nguyên vẹn
- tránh xa khu vực có lửa hoặc vùng có nguy cơ bắt lửa
- không để sản phẩm nơi ẩm ướt hoặc nơi có nhiệt độ cao

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Trình Đức Tuấn