

20

510

240

55

560.000 mm

105

20

240

110

5

120.000 mm

5



한국표준협회
Korea Standards Association

KHẨU TRANG Y TẾ

KF94

10 cái

PCS

KHẨU TRANG Y TẾ **KF94**

제품명

뉴프리데이항사방역마스크

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | USER GUIDE




1. Kéo khẩu trang che kín phần mũi và cằm
Cover your nose and chin



2. Ấn thanh nẹp ôm khít vào sống mũi
Make the nose wire hug your bridge of the nose tightly



3. Dùng tay dàn đều khẩu trang ôm khít khuôn mặt
Spread the mask over your face with your hands

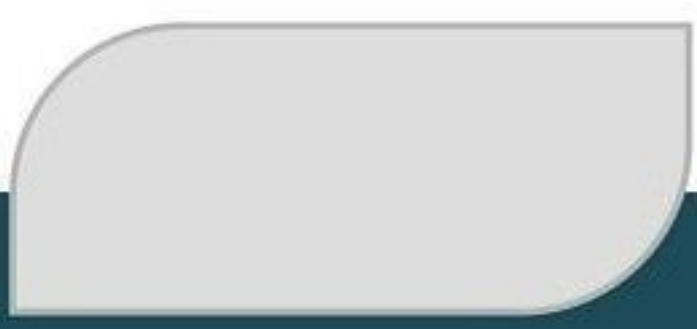

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG:

- Rửa tay trước và sau khi tháo khẩu trang.
- Khi đeo khẩu trang thì không được sờ hay chạm vào khi chưa rửa tay.
- Không chạm tay vào mặt trong của khẩu trang gây nhiễm khuẩn khẩu trang.
- Không rửa với nước. **KHÔNG GIẶT LẠI ĐƯỢC.**
- Gấp đôi khẩu trang lại khi không dùng nữa và bọc túi nilon rồi mới vứt vào thùng rác nhằm tránh lây lan vi khuẩn, virus ra ngoài môi trường.

ĐẶC ĐIỂM:

- Công nghệ lọc tĩnh điện, ngăn chặn 95% bụi siêu mịn.
- Cơ chế: Hấp thụ bụi siêu mịn vào cấu trúc sợi bằng bộ lọc đã xử lý tĩnh điện với dòng điện áp cao từ 25.000V trở lên.
- Thiết kế hình oval dạng gấp, ôm sát sống mũi và ôm sát hai bên má. Không tạo ra các kẽ hở, bảo vệ hệ hô hấp. Với cấu trúc lọc x 4 lần. Lọc các lớp bụi siêu vi PM 2.5 mà mắt thường không nhìn thấy được.

Sản xuất bởi:
Công ty TNHH sản xuất thiết bị Y tế Đạt Phát
Đc: Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, tp. Hà Nội

NSX:
HSD: 3 năm kể từ NSX



Kháng khuẩn

4 LAYERS

10 cái

PCS

ĐẠT PHÁT