

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
NƯỚC MUỐI ĐIỆN PHÂN  
(Model: HTA)**

**1. Hướng dẫn sử dụng:**

- Súc miệng, nhỏ mũi pha 50ml HTA với 250ml với nước ấm: súc kỹ khoảng 1 phút rồi nhỏ đi, nhỏ 5,6 giọt vào mỗi bên mũi. Ngày dùng 2 – 4 lần cách nhau 3-4h
- Dùng ngoài da: Dùng bông gạc mềm tẩm dung dịch để đắp, lau, rửa vùng cần vệ sinh từ 10-30 phút.

**2. Hướng dẫn bảo quản:** Bảo quản ở nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp

**3. Cảnh báo:** Không được tiêm

**HỘ KINH DOANH  
ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG  
CHỦ HỘ**



*Đặng Thị Huyền Thương*