

NỘI DUNG TIẾNG VIỆT TRÊN NHÃN CỦA SẢN PHẨM

Tên trang thiết bị y tế: Dung dịch tiền xử lý dụng cụ trước khi rửa

Chủng loại: Power Quick Pre-Cleaning Spray

Mã sản phẩm: 50330

Thành phần: Chất giữ ẩm, chống máu đông, chống ăn mòn & kháng khuẩn.

Định lượng: Thể tích thực 500ml

Đặc tính: Power Quick Pre-Cleaning Spray là phương pháp tiền xử lý đơn giản trước khi rửa dụng cụ y tế bằng máy. Dạng chế phẩm không tạo bọt thích hợp để xử lý dụng cụ trước khi rửa dụng cụ bằng máy rửa phun tia hoặc máy rửa bằng sóng siêu âm. Thành phần gồm chất giữ ẩm (không làm khô dịch nhầy cơ thể bám trên dụng cụ) và chất chống đông máu trên dụng cụ giúp làm tăng hiệu quả làm sạch dụng cụ của máy rửa phun tia. Chế phẩm thích hợp dùng cho các dụng cụ y tế bằng thép không gỉ, nhôm, đồng và thau.

Công dụng: Dùng để chống khô dịch nhầy cơ thể bám trên dụng cụ y tế và chống đông máu trên dụng cụ trong 3 ngày (trong điều kiện đóng chặt nắp).

Hướng dẫn sử dụng: Xịt lượng dung dịch vừa đủ dùng trực tiếp lên bề mặt dụng cụ y tế cần xử lý. *Lưu ý: Xịt dung dịch lên dụng cụ bị nhiễm khuẩn càng sớm bao nhiêu thì càng có hiệu quả khi rửa sạch dụng cụ bấy nhiêu

Thông tin cảnh báo: *Đọc kỹ thông tin sản phẩm trước khi sử dụng *Không sử dụng chế phẩm ngoài mục đích chỉ định *Đề xa tầm với trẻ em *Đeo găng tay, khẩu trang, tạp dề, kính bảo hộ khi thao tác với chế phẩm *Không trộn lẫn chế phẩm với hóa chất hoặc chế phẩm tẩy rửa khác *Thử nghiệm chế phẩm trước khi xịt lên dụng cụ để đảm bảo chế phẩm không ảnh hưởng đến chất liệu của dụng cụ *Sử dụng chế phẩm ở khu vực thông thoáng, không xịt chế phẩm cao hơn tầm mắt * Không ăn, uống, hút thuốc khi sử dụng chế phẩm.

Phương pháp sơ cứu: *Nếu dung dịch tiếp xúc vào mắt, lập tức rửa mắt bằng nước từ vòi trong 15 phút và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị, mang theo nhãn sản phẩm *Nếu dung dịch tiếp xúc với da, lập tức rửa sạch bằng nước và cởi bỏ quần áo và dây đeo bị dính dung dịch. *Nếu nuốt phải sản phẩm, uống nhiều nước và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, mang theo nhãn sản phẩm, không ép bệnh nhân nôn mửa.

Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Số lưu hành:.....

Chủ sở hữu số lưu hành, nhà nhập khẩu: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SARAYA GREENTEK TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 05.05, lầu 5, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tên nhà sản xuất: Saraya Co., Ltd. Địa chỉ: 2-2-8 Yuzato, Higashisumiyoshi-ku, Osaka 546-0013, Japan.

Xuất xứ: Nhật bản

Tên đơn vị phân phối: CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ XANH. Địa chỉ: Lô B8, đường N4, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Số lô SX/ Ngày SX: In trên vỏ bình

HSD: 2 năm kể từ ngày sản xuất hoặc 1 năm kể từ ngày mở nắp bình.

Hướng dẫn đọc ngày sản xuất từ số lô: Năm/Tháng/Ngày/Thứ tự lô sản xuất trong ngày.

**VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH
SARAYA GREENTEK TẠI HÀ NỘI**



GIÁM ĐỐC
Dương Linh Trang