

Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GĂNG TAY CAO SU Y TẾ**

- Găng tay cao su y tế có thể dùng để đeo được cho cả tay trái và tay phải.
- Găng tay cao su y tế không dùng thay thế cho găng phẫu thuật (khi trực tiếp mổ cho bệnh nhân.)
- Khi sử dụng găng tay cần vệ sinh tay, đeo găng tay, thực hiện các thao tác thủ thuật, tháo găng tay ngay sau khi xong việc, loại bỏ và xử lý găng tay một cách an toàn, vệ sinh lại tay.
- Phải thay ngay găng tay nếu bị rách, thủng và xử lý găng tay bị hỏng bằng cách sử dụng các thiết bị phù hợp. Cần tháo bỏ, xử lý găng tay và sử dụng găng tay mới giữa các thao tác khác nhau trên cùng một bệnh nhân khi tiên lượng sẽ có khả năng lây nhiễm mầm bệnh từ bộ phận này sang bộ phận khác. Nên tháo bỏ, xử lý găng tay ngay sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân hoặc một bề mặt có khả năng đã bị nhiễm khuẩn và sử dụng găng tay mới khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc môi trường khác. Chú ý việc vệ sinh tay ngay sau khi loại bỏ và xử lý găng tay.

• Chống chỉ định:

Găng tay có chứa cao su tự nhiên có thể gây dị ứng. Không sử dụng găng tay nếu biết dị ứng với cao su.

• Cảnh báo và thận trọng:

- Không dùng găng bị rách, có lỗ thủng, đã quá hạn sử dụng.
- Không dùng găng trong môi trường xăng, dầu và các chất ăn mòn hoá học.
- Không sử dụng thêm bột bôi trơn loại không an toàn để dễ đeo tay.
- Sản phẩm tự phân hủy, không có yêu cầu cụ thể trong tiêu hủy. Nếu găng tay bị nhiễm chất độc hoặc các chất thải sinh học, cần tiêu hủy như rác thải độc hại. Nếu găng tay chưa nhiễm bẩn hoặc đã được khử độc, có thể chôn dưới đất hoặc đốt.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
Võ Huy Quang