

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NƯỚC MUỐI SINH LÝ

### 1. THÀNH PHẦN

Tên sản phẩm: NƯỚC MUỐI SINH LÝ

Chủng loại: Natriclorid 0.9%

Thành phần: Natri Clorid, Nano bạc, Nước tinh khiết vừa đủ

### 2. CÔNG DỤNG:

- Giúp loại bỏ các chất bẩn trên bề mặt, giữ ẩm và làm dịu mắt. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu viêm nhiễm do đau mắt đỏ, đỏ gị mắt, sử dụng nước muối sinh lý trước khi sử dụng các thuốc điều trị, giúp các thuốc đặc trị có hiệu quả tốt hơn. Có thể nhỏ mắt sau khi đi xa nhiều bụi bặm, sau khi đi bơi để loại bụi, chất nhầy thừa nhằm ngăn ngừa các bệnh nhiễm khuẩn mắt
- Vệ sinh mũi họng: sử dụng khi bị viêm mũi họng hoặc viêm đường hô hấp, giúp loại bỏ chất nhầy, làm mũi thông thoáng, giúp dễ thở hơn
- Vệ sinh tai: sử dụng vệ sinh tai trong các trường hợp bị viêm nhiễm.
- Vệ sinh vết thương: giúp loại bỏ chất bẩn và vi khuẩn trên bề mặt
- Nước muối sinh lý sử dụng xúc miệng giúp loại bỏ các vi khuẩn vùng hầu họng, bảo vệ niêm mạc họng, ngăn ngừa viêm nhiễm.

### 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Vệ sinh mũi: Lấy 1 lượng vừa đủ nhỏ vào mũi ngày 3-4 lần
- Vệ sinh răng miệng, họng: dùng dượng vừa đủ, ngậm và súc miệng họng 3-4 lần.

### 4. BẢO QUẢN

- Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt, tránh va chạm.
- Không để gần nơi chứa các hóa chất độc hại và không chồng chất vật nặng lên trên gây dập hay gãy bề sản phẩm, rách bao bì sản phẩm.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng

### 5. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Không được tiêm

### 6. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Hà Nội, Ngày 25 tháng 12 năm 2021

