

●パワークイック 予備洗浄スプレー 500mL タックラベル

パワークイック

予備洗浄スプレー

乾燥・固化の防止に

使用方法

使用後の汚染した医療器具に本剤をスプレーしてください。

- 器具全体にムラなくスプレーしてください。
- 汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。



SARAYA

パワークイック 予備洗浄スプレー

使用後の器具にスプレーするだけで、血液の乾燥を防止します。抗菌剤配合。

使用上の注意

●用途以外には使用しない。●小児の手の届かないところに保管する。●作業時は必ず手袋、マスク、エプロン、ゴーグルなどの防護具を着用する。●他の薬剤・洗浄剤等とは混ぜない。●樹脂の種類やメッキ製品等金属の種類によっては、変化をきたす場合があるので、あらかじめ試験をしてから使用する。●換気のよいところで使用し、目より高い所へのスプレーは避ける。

応急処置 ●目に入った場合は直ちに水洗いし、医師の処置を受ける。●飲み込んだ場合は、直ちに医師の処置を受ける。●皮ふについたときは水で洗い流す。

目注意 小児に注意 防護具着用



※必ず使用前に「使用上の注意」と「使用方法」をお読みください。

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------|------------------|----|----|
| 品名 | 予備洗浄スプレー | 用途 | 使用済み医療器具の血液乾燥防止用 | 液性 | 中性 |
| 成分 | 湿潤剤、血液凝固防止剤、防錆剤、抗菌剤 | | | | |
| 正味量 | 500mL | 使用量の目安 | 適量を噴霧 | | |

50330

業務用 500mL [スプレー付]

製造販売元 **サラヤ株式会社**
 大阪市東住吉区湊里2-2-8
 TEL. 06(6797)2525

MADE IN JAPAN



4 9 8 7 6 9 6 5 0 3 3 0 4

サラヤ株式会社の医療従事者向けサイト
 Medical SARAYA → <http://med.saraya.com/>