

Mẫu nhãn lưu hành TTBYT tại Việt Nam



Tên sản phẩm: **DỤNG CỤ CHUYÊN PHÔI DÙNG TRONG Y TẾ**

MODEL: 205018, 205023, 205118, 205123, 205218, 205223, 205318, 205323, 213322, 213325, 214322, 214325, 214422, 214425, 215018, 205023, 215118, 215123, 215218, 215223, 215318, 215323, 223322, 223325, 223340, 224322, 224325, 224422, 224425, 243017, 243020, 244017, 244020, 275018, 275023, 294015, 294020, 275118, 275123, 275218, 275223, 275318, 275323, 294115, 294120, 225423, 225518, 225523, 225618, 225623, 225718, 225723

Số seri: Trên bao bì sản phẩm

Số lưu hành:

Số lô: Trên bao bì sản phẩm

Xuất xứ: **Nhật Bản**

Quy cách đóng gói: 10 cây / hộp

Công dụng: Dùng để chuyển phôi đã thụ tinh trong ống nghiệm vào buồng tử cung

Cách sử dụng: Đặt mỏ vịt vào đường âm đạo của bệnh nhân. Mở mỏ vịt, lau sạch cổ tử cung bằng môi trường chuyên phôi chuyên dụng. Mở bao bì chứa dụng cụ. Luồn nhẹ nhàng nòng ngoài của dụng cụ chuyên phôi qua ống cổ tử cung vào đến eo tử cung, vừa luồn vừa quan sát dưới siêu âm qua đường bụng bằng máy siêu âm chuyên dụng. Kết hợp với syringe 3ml, hút phôi vào nòng trong của dụng cụ dưới kính hiển vi chuyên dụng trong hỗ trợ sinh sản. Luồn nhẹ nhàng nòng trong có chứa phôi vào trong buồng tử cung theo hướng mà nòng ngoài đã chuẩn bị ở bước trên, đầu nòng trong cách đáy tử cung khoảng 2 cm. Bom nhẹ nhàng đặt phôi vào trong buồng tử cung. Nhẹ nhàng rút dụng cụ chuyên phôi ra khỏi buồng tử cung. Kiểm tra lại nòng trong sau khi chuyển dưới kính hiển vi chuyên dụng để đảm bảo không bị sót phôi.

Tháo mỏ vịt khỏi đường âm đạo bệnh nhân

Cảnh báo:

Bảo quản: Nơi thoáng mát

Năm sản xuất, hạn sử dụng: Trên bao bì sản phẩm

Hãng chủ sở hữu: **Kitazato Corporation**

Địa chỉ: **Nhật Bản**

Hãng sản xuất: **Kitazato Corporation**

Địa chỉ: **Nhật Bản**

Nhà phân phối: **Công Ty TNHH Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ**

Địa chỉ: **A44 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM**