

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty TNHH Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ

Địa chỉ: A44 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP HCM

Ngày 30 tháng 04 năm 2022

Thiết bị: Dụng cụ chuyên phôi dùng trong y tế

Model:ETCathete (205018,205023,205118,205123,205218,205223,205318,205323,213322,213325,214322,214325,214422,214425,215018,205023,215118,215123,215218,215223,215318,215323,223322,223325,223340,224322,224325,224422,224425,243017,243020,244017,244020,275018,275023,294015,294020,275118,275123,275218,275223,275318,275323,294115,294120,225423,225518,225523,225618,225623,225718,225723)

Hãng sản xuất: Kitazato Corporation/ Nhật Bản

Nước sản xuất: Kitazato Corporation/ Nhật Bản

Hướng dẫn sử dụng:

Làm theo các thao tác sau:


- Đặt mở vệt vào đường âm đạo của bệnh nhân
- Mở mở vệt, lau sạch cổ tử cung bằng môi trường chuyên phôi chuyên dụng
- Mở bao bì chứa dụng cụ
- Luồn nhẹ nhàng nòng ngoài của dụng cụ chuyên phôi qua ống cổ tử cung vào đến eo tử cung, vừa luồn vừa quan sát dưới siêu âm qua đường bụng bằng máy siêu âm chuyên dụng
- Kết hợp với syringe 3ml, hút phôi vào nòng trong của dụng cụ dưới kính hiển vi chuyên dụng trong hỗ trợ sinh sản



- Luồn nhẹ nhàng nòng trong có chứa phôi vào trong buồng tử cung theo hướng mà nòng ngoài đã chuẩn bị ở bước trên, đầu nòng trong cách đáy tử cung khoảng 2 cm
- Bơm nhẹ nhàng đặt phôi vào trong buồng tử cung.
- Nhẹ nhàng rút dụng cụ chuyển phôi ra khỏi buồng tử cung
- Kiểm tra lại nòng trong sau khi chuyển dưới kính hiển vi chuyên dụng để đảm bảo không bị sót phôi.
- Tháo mỏ vịt khỏi đường âm đạo bệnh nhân
- Chuyển BN ra giường nằm nghỉ.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã kê khai trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

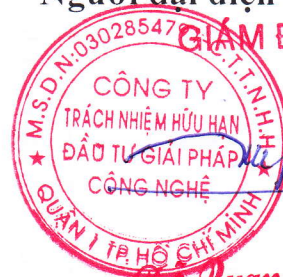

*Đ. Quang Tuyên*

