

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công Ty TNHH Đầu Tư Giải Pháp Công Nghệ

Địa chỉ: A44 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP HCM

Ngày 31 tháng 05 năm 2018

Thiết bị: Kim chọc hút trứng non OPU

Model: **OPU Needle (310001,313201,316001,317001,318001,319001,320300, 320350,321300,322300,326350,327350,328350,329350,336350,337350,338350,3 39350,347275,347277,357354,358354,359354,376350,377350,378350,381719,38 1721,382022,382123)**

Hãng sản xuất: Kitazato Corporation/ Nhật Bản

Nước sản xuất: Kitazato Corporation/ Nhật Bản

Hướng dẫn sử dụng:

Làm theo đúng các thao tác sau:

- Giảm đau bằng gây mê toàn thân hoặc gây tê tại chỗ, có thể kết hợp tiền mê
- Đặt mỏ vịt vào đường âm đạo bệnh nhân
- Làm sạch âm hộ, âm đạo, cổ tử cung bằng nước muối sinh lý
- Mở bao bì chứa dụng cụ
- Gắn kim chọc hút trứng vào thiết bị chọc hút trứng chuyên dụng, kết hợp cùng máy siêu âm ngã bụng sao cho thấy rõ đầu kim trên màn hình
- Trước khi sử dụng nên tráng kim bằng môi trường sử dụng để chọc hút trứng để đảm bảo tính an toàn và vô trùng.
- Tiến hành chọc hút noãn dưới hướng dẫn của siêu âm
- Chuyển ngay dịch nang chọc hút được vào phòng lab để tìm và thu nhận noãn
- Tráng lại bơm tiêm và kim tránh sót noãn trong kim và bơm tiêm sau khi kết thúc quá trình chọc hút noãn
- Tháo mỏ vịt khỏi đường âm đạo bệnh nhân



- Chuyển BN ra giường nằm nghỉ và theo dõi sau chọc hút

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã kê khai trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

