

# Hyalosan Vaginal Gel With Hyaluronic Acid - Tuýp ngừa viêm, dưỡng ẩm Hyalosan

**Thành phần:** Hyaluronic acid (dưới dạng Sodium Hyaluronate), Lactic Acid, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Nước (Aqua).

## Công dụng:

- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa.
- Hỗ trợ điều trị khô âm đạo, dưỡng ẩm, trẻ hóa vùng kín.
- Tạo môi trường vi sinh và pH lý tưởng để bảo vệ vùng kín.
- Hỗ trợ bôi trơn khi quan hệ tình dục.

## Đối tượng sử dụng:

- Phụ nữ muốn phòng ngừa, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa.
- Phụ nữ bị khô âm đạo, bị giảm màng nhầy và teo âm đạo, thường hay bị ngứa, mẩn đỏ hoặc cảm giác không thoải mái khi giao hợp.
- Có thể quan hệ tình dục trong giai đoạn sử dụng sản phẩm.

## Hướng dẫn sử dụng:

- Hỗ trợ điều trị: Sử dụng 1 lần/ngày trong 10 ngày liên tục. Sau đó, giảm xuống 2-3 lần/tuần trong ít nhất 5-6 tuần.
  - Phòng ngừa: sử dụng lâu dài 1-2 lần/tuần để có hiệu quả tốt nhất.
  - Cách dùng: Nằm ở tư thế thoải mái. Mở nắp của tuýp, nhẹ nhàng đưa phần đầu nhỏ của tuýp vào trong âm đạo, bóp và giữ cho tới khi đưa tuýp ra, tránh gel bị hút ngược trở lại tuýp. Nằm ngừa vài phút sau khi thoa để gel có thể bao phủ đều niêm mạc âm đạo.
- Nên sử dụng trước khi đi ngủ hoặc trước khi quan hệ tình dục.

**Điều kiện bảo quản:** Bảo quản ở nhiệt độ từ 5°C đến 25°C.

## Cảnh báo và thận trọng:

- Không sử dụng trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc trong trường hợp tăng tiết âm đạo.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, trong thời kỳ mang thai và khi sử dụng đồng thời các chế phẩm đặt âm đạo khác (bao gồm cả biện pháp tránh thai đặt âm đạo).
- Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng.

- Không dùng sau hạn sử dụng ghi trên bao bì.

- Để xa tầm tay trẻ em

**Quy cách đóng gói:** Hộp 10 tuýp x 7,5 ml

**Số lô SX, ngày SX và hạn sử dụng:** xem trên bao bì thương phẩm

**Nhà sản xuất:** Dr. Müller Pharma s.r.o.

Địa chỉ: U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové, Czech Republic

**Xuất xứ:** Cộng hòa Séc

**Chủ sở hữu số công bố/ Nhà nhập khẩu:** CÔNG TY TNHH HEALTHSK

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Zodiac, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Nhà phân phối :** Công ty TNHH Trust Me

Địa chỉ: số 36, ngách 157/16 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

**Số công bố:**

