

NIPRO

EN

NIPRO EXTENSION TUBE DÂY NỐI NIPRO




Chỉ định

Dụng cụ này được kết nối với kim lùn, khóa 3 ngã, AVF, PSV hoặc ống thông hơi.
Sử dụng một lần

Chống chỉ định

Việc sử dụng dây nối truyền dịch không tự nó là một liệu pháp điều trị và không có chống chỉ định cụ thể khi được sử dụng theo đúng chỉ định.

Hình ảnh sản phẩm

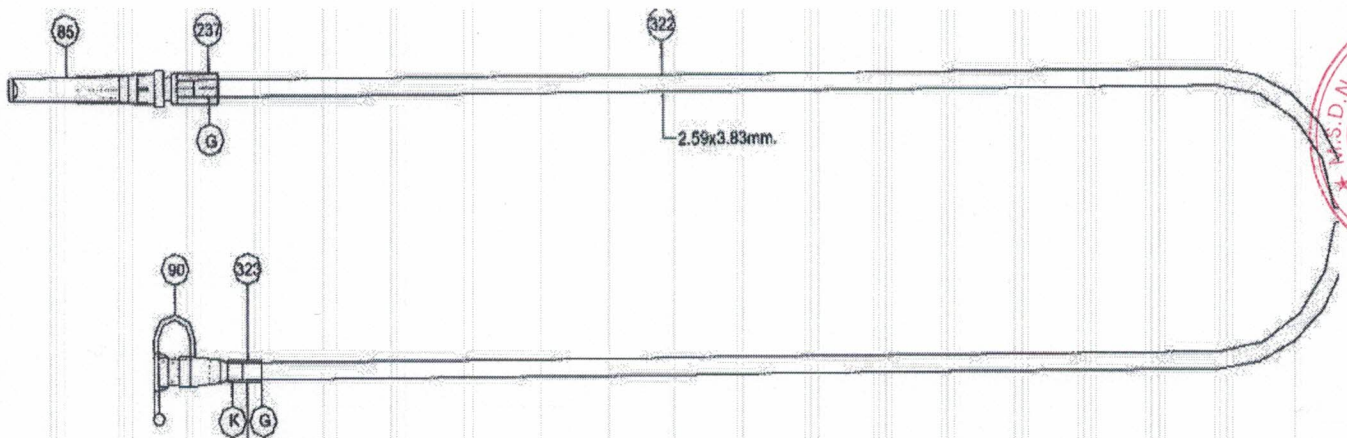

Mô tả thành phần

Số bộ phận	Tên bộ phận
85	Nắp
237	Khóa chữ T
322	Dây 2.59*3.83mm
323	Dây 3.38*4.22mm
90	Đầu nối luer PSV 1.8
G, K	-

Tiệt trùng ETO

Sản phẩm tiệt trùng, không độc chất, không Pyrogenic.



Hướng dẫn sử dụng

Dây nối được kết nối với kim lều để cho phép kéo dài khoảng cách giữa bệnh nhân khi truyền dịch.

Bộ dây nên được mồi trước khi kết nối với kim lều, nếu nó được sử dụng để truyền dịch, phải gắn ống tiêm và mồi bộ trước khi kết nối với bệnh nhân.

Khi đã đặt xong kim lều, đầu nối male của dây có thể được lắp vào với đuôi kim lều. Đầu kia của dây nối sau đó có thể được tiếp cận bằng một ống tiêm hoặc kết nối với bộ truyền hoặc hệ thống bơm tiêm chính để truyền chất lỏng và thuốc.

Dây nối với đường kính nhỏ được sử dụng cho bệnh nhi và trẻ sơ sinh vì thường yêu cầu thể tích / tốc độ dòng chảy thấp hơn đối với những bệnh nhân nhỏ hơn.

Thận trọng

Không sử dụng nếu bao bì không nguyên vẹn

Thải loại sau khi sử dụng một lần

Không lưu trữ ở nhiệt độ và độ ẩm cao

Hạn dùng

Theo ngày ghi trên bao bì

Hạn dùng: 05 năm



NIPRO CORPORATION
3-9-3, Honjo – Nishi, Kita-Ku, Osaka, Japan



NIRPRO SALES THAILAND Co., LTD.,
2nd floor, Juthamard building, 89/170, Viphavadee Rangsit Road, Talad Bangkhen, Laski,
Bangkok 10210, Thailand

NIPRO (THAILAND) CORPORATION LIMITED
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena Phra Nakorn Si Ayuthaya Thailand 13110