



**CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM),**  
 20 Đại lộ tự do, KCN Việt nam – Singapore, TP.Thuận An – Bình Dương, VN.  
 ĐT: (+84) 274-3782014 Fax: (+84) 274-3782015 Email: sale1@fgm.com.vn

**CÔNG TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỒNG DẪN LƯU.**


(Drain tube)

**I/ Tính năng kỹ thuật:**

1. Tên sản phẩm: Ống dẫn lưu (*Drain tube*).
2. Nguyên liệu : Nhựa PVC\_(F-8N)
3. Ứng dụng : Dẫn lưu.
4. Thành phần cấu tạo và đặc tính:
  - Ống dẫn lưu được làm từ nhựa PVC y tế\_(F-8N).
  - Ống dày mềm, dẻo, có tính đàn hồi cao, giúp thuận tiện khi thao tác.
  - Màu trắng tự nhiên dễ quan sát.

**Hình dạng sản phẩm:**

Ống dẫn lưu không lỗ (*Drain tube*)

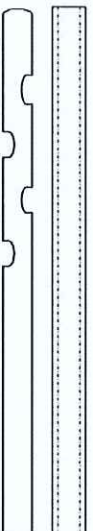

Ống dẫn lưu có lỗ (*Drain tube with hole*)

5. Mã sản phẩm & qui cách đóng gói:

Mã sản phẩm	Kích cỡ (mm)	Chiều dài (mm)	Không lỗ	Có lỗ	Tiệt trùng EOG	Không tiệt trùng EOG	Qui cách đóng gói (bộ/thùng)
DR0507-M-01C	51D x 70D	396	✓		✓		1,000 bộ/ thùng
DR0507-M-01CH	51D x 70D	396		✓	✓		1,000 bộ/ thùng
DR0507-M-01C-2	51D x 70D	1,000	✓			✓	500 bộ/ thùng
DR0507-M-01C-3	51D x 70D	1,000	✓		✓		200 bộ/ thùng
DR0507-M-01C-4	51D x 70D	1,200	✓		✓		200 bộ/ thùng
DR0710-M-01C	71D x 100D	396	✓		✓		1,000 bộ/ thùng
DR0710-M-01CH	71D x 100D	396		✓	✓		1,000 bộ/ thùng
DR0710-M-01C-2	71D x 100D	1,200	✓		✓		200 bộ/ thùng
DR0710-M-01C-3	71D x 100D	1,000	✓			✓	500 bộ/ thùng
DR0710-M-01C-4	71D x 100D	1,000	✓		✓		200 bộ/ thùng

6. Sản phẩm được tiệt trùng bằng **EOG** (*Ethylene oxide gas*);
7. Nhân sản phẩm được dán trên bao bì và ghi rõ nhà sản xuất, nhà cung cấp gồm:
  - Tên sản phẩm, mã sản phẩm.
  - Đường kính và chiều dài, Số lượng.
  - Tiệt trùng EOG (*xem "Ster."*)
  - Số lô sản xuất (*xem "Lot No."*)
  - Hạn sử dụng (*xem "Exp. Date"*)
  - Số đăng ký lưu hành sản phẩm (*xem "License No."*)
  - Xuất xứ Việt Nam (*xem "Made in Vietnam"*)
8. Sản phẩm được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016.
9. Hạn sử dụng : Thăm khảo hạn sử dụng in trên nhãn bao bì và thùng đựng sản phẩm.



**II/ Hướng dẫn sử dụng:**

- Sản phẩm đã được tiệt trùng nên có thể sử dụng ngay.
- Sử dụng sản phẩm ngay sau khi mở bao tiệt trùng.
- Chọn đúng kích cỡ ống khi sử dụng.
- Kết nối ống chắc chắn với các thiết bị đầu nối và đảm bảo không bị rò rỉ.
- Thường xuyên thực hiện kiểm tra vị trí nối giữa ống và đầu nối khi sử dụng.

**III/ Lưu ý trước khi sử dụng:**

- 1- Sản phẩm y tế chỉ sử dụng 01 lần. Cần sử dụng lại.
- 2- Không sử dụng sản phẩm khi phát hiện hỏng bao bì, rách hoặc dơ, biến dạng.
- 3- Sử dụng ngay sau khi mở bao bì sản phẩm.
- 4- Sau khi sử dụng, để phòng tránh việc truyền nhiễm phải xử lý vứt bỏ theo phương pháp an toàn cho dụng cụ y tế.
- 5- Không sử dụng sản phẩm đã quá hạn sử dụng.

**IV/ Phương pháp lưu trữ và bảo quản:**

- Không bảo quản nơi ẩm ướt, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao.
- Không để nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
- Chú ý không làm bẹp hay gãy gấp, cong sản phẩm.

