

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



ỐNG NỐI DÂY MÁY THỞ (CATHETER MOUNT)-SỬ DỤNG 1 LẦN

GIẢI THÍCH CÁC BIỂU TƯỢNG

	Sử dụng một lần Định nghĩa về sử dụng một lần là để sử dụng cho một bệnh nhân cho một thủ thuật.		Nhà sản xuất
	= Không tái xử lý /khử trùng lại		phạm vi nhiệt độ
	Sử dụng theo ngày		Tư Vấn Hướng Dẫn Sử Dụng
	= Số lô hoặc số lô.		Tránh không để tiếp xúc với ánh nắng.
	Ngày sản xuất.		tránh thấm nước
	= Số catalogue thiết bị/mã sản phẩm/ hàng tồn kho		= Chứa mũ cao su
	Chú ý		= Không sử dụng bao bì bị ướt hoặc bị hỏng.
			= Chứa hoặc Sự có mặt của Phthalates.

Rx (Hoa Kỳ)

Luật Liên bang Hoa Kỳ hạn chế bán thiết bị này theo hoặc theo lệnh của bác sĩ.

Mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng

Được sử dụng kết hợp với hệ thống thở bệnh nhân khi cần thiết.

Sản phẩm này chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế chuyên nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng

Đây là những hướng dẫn chung dành cho nhân viên y tế có trình độ sử dụng

- Khi cần có ống nối, đảm bảo khớp và kết nối chính xác được an toàn.

Cảnh báo & Biện pháp phòng ngừa

- Đảm bảo tất cả các kết nối đều an toàn
- Trước khi sử dụng: kiểm tra hệ thống theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy thở, đường ống lấy mẫu khí và thiết bị theo dõi khí
- Không sử dụng khi có chất gây mê dễ cháy
- Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng
- Dùng cho một bệnh nhân

Nhiệt độ bảo quản & độ ẩm: 10°C (50°F) đến 30°C (86°F), 30 – 50% RH

Nhiệt độ hoạt động: -18°C (0°F) đến 50°C (122°F)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chu Hiền