

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

1. Phôi sứ Zirconia: Là vật liệu có đặc tính tương tích sinh học cao với thành phần Zirconium Oxit được nén thành dạng phôi. Được sử dụng trong sản xuất và chế tác răng giả, mão toàn sứ, mão một phần và cầu răng ở vùng trước và sau.

Thành phần:

ZrO₂, Y₂O₃, HfO₂, Al₂O₃ và các oxit khác.

Bảo quản: Trong môi trường mát và khô (10 °C ~ 35 °C độ ẩm dưới 70%), tránh tiếp xúc ánh nắng trực tiếp mặt trời.

2. Mục đích: Sử dụng trong phục hình răng nhân tạo, chế tác khung sườn cho cầu, mão răng, inlay, onlay. Được sử dụng bởi các xưởng (Labo) làm răng giả dưới sự chỉ định của nha sĩ.

3. Hướng dẫn sử dụng:

- 1) Lấy đĩa phôi ra khỏi hộp và kiểm tra xem có vỡ nứt không.
- 2) Gắn đĩa phôi vào máy cắt và khởi động máy
- 3) Sau khi cắt, dùng mũi khoan kim cương để cắt rời khung sườn của mão răng.
- 4) Kết thúc với chùy tia vonfram cắt ngang và khung khử bụi bằng súng hơi.
- 5) Tạo màu cho mão răng bằng dung dịch tạo màu
- 6) Để khô dưới đèn hồng ngoại 45 phút
- 7) Đặt mão sứ vào khay để nung
- 8) Lấy mão sứ đã nung và làm nguội.
- 9) Đặt mão sứ vào mẫu hàm để điều chỉnh
- 10) Kiểm tra lại mão sứ có nứt vỡ không
- 11) Làm bóng bằng vật liệu làm bóng. Nếu cần, hãy sử dụng tuabin không khí để đánh bóng khung nung kết bằng gờ kim cương.

4. Lưu ý:

- 1) Sản phẩm chỉ nên được sử dụng bởi các chuyên gia và kỹ thuật viên nha khoa.
- 2) Không sử dụng sản phẩm cho mục đích khác với mục đích sử dụng
- 3) Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm này khi có các chất gây ô nhiễm bao gồm cả các chất lạ.
- 4) Không sử dụng nếu phục hình bị nứt.
- 5) Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng một lần. Không sử dụng nó một lần nữa khi nó đã được sử dụng.
- 6) Đảm bảo đọc hướng dẫn của nhà sản xuất và làm theo hướng dẫn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

Giám đốc



Song Min Sik