


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA

Model: PKLPPC 125

Hãng sản xuất: Paramedical srl

Nước sản xuất: Italy

----o0o---

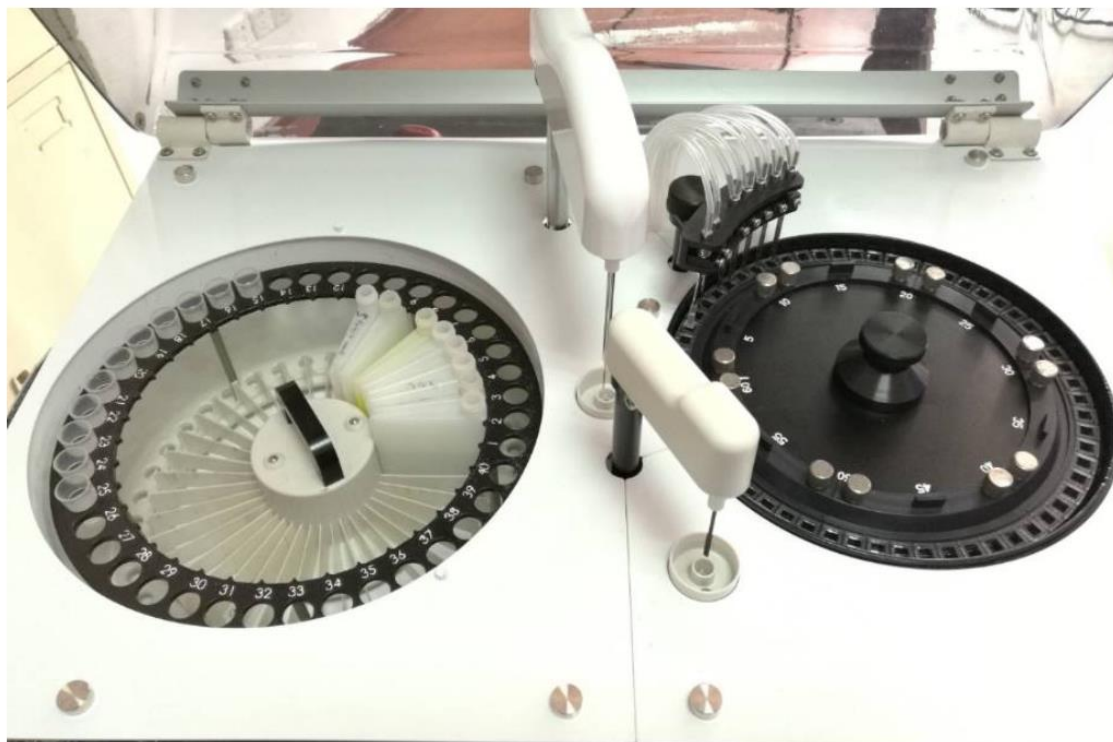

## 1. **Mở máy:**

Mở công tắc nguồn máy PKL PPC 125, (mở công tắc màu đỏ trước màu xanh sau).

Mở chương trình 200 SPEED của máy PKL PPC 125

Gõ Login ID: admin

Gõ Password: admin

## 2. **Vệ sinh máy buổi sáng: MAINTERNANE → Cuvettes cleang.** Máy rửa từ 1-60, khi rửa máy xong là ta có thể chạy mẫu.

## 3. **Chạy Mẫu:** Vào → SCHEDULE → Nhập tên ở mục Patient ID.

**Sam.ID:** số mẫu trong ngày.

**Style:** nếu dùng tube máu thì ta chọn tube, nếu dùng cup thì ta chọn sample cup.

**Sample cup:** vị trí để mẫu trên mâm quay từ 1 → 40.

Chọn test cần chạy → Save & modify → Reagent check → Star.

Mẫu tiếp vào STAT → nhập thông tin tự như trên.

## 4. **Xem kết quả:** Vào mục REPORT → chọn mẫu cần xem .

Tìm kết quả cũ, gõ ngày cần tìm ở mục (From-To)

## 5. **Khi máy bị trục trặc:** Vào mục MAINTERNANE → Initialisation

## 6. **Vệ sinh máy:** MAINTERNANE → Cuvettes cleang

Cuối ngày MAINTERNANE → Water fill → xong ấn Return, và tắt máy