

## Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.

Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,  
Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China.

Tel: +86-574-8778 6632  
Fax: +86-574-8778 6644  
info@greatcare.cn



Creating a Better Care

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY CHO ĂN( Stomach Tube)



#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG / CHỈ ĐỊNH

Dây cho ăn được sử dụng để đưa thức ăn, chất dinh dưỡng, thuốc hoặc các chất khác vào dạ dày cho bệnh nhân hôn mê hoặc bệnh nhân bị khó nuốt, hoặc dẫn lưu các chất không mong muốn ra khỏi dạ dày hoặc giảm đầy hơi dạ dày. Ống được đưa vào dạ dày của bệnh nhân qua mũi hoặc miệng của bệnh nhân.

*Cao Xuân Quỳnh Anh*

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch thực quản nghiêm trọng, hẹp đường mũi, hẹp/tắc nghẽn thực quản hoặc tim, khó thở nghiêm trọng, viêm loét dạ dày không được khuyến khích sử dụng.
- Thận trọng khi sử dụng cho các bệnh nhân bị viêm nhiễm

#### CẢNH BÁO/THẬN TRỌNG

- Không sử dụng nếu bao bì đã được mở hoặc bị hỏng.
- Đọc tất cả các cảnh báo và hướng dẫn trước khi sử dụng, sử dụng không đúng cách có thể gây ra bệnh tật hoặc các tổn thương nguy hiểm/chết người.
- Để lựa chọn ống có kích thước phù hợp cho từng bệnh nhân, sử dụng đánh giá lâm sàng của các chuyên gia
- Luồn dây từ từ vào dọc một bên mũi để đưa dây vào họng (14-16 cm), yêu cầu bệnh nhân nuốt và trong lúc này đưa ống vào. Nếu người bệnh gặp các triệu chứng như tím tái hoặc ho trong khi đặt ống thì cần dừng ngay thao tác và rút ống ra.
- Khi đã luồn xong, dây cho ăn nên được kiểm tra để đảm bảo dây nằm ở vị trí thích hợp trong dạ dày.
- Trước khi đưa luồn, ống được bôi trơn hoàn toàn, phải xác định chắc chắn chất bôi trơn đã không đi vào và làm tắc các mắt ống, làm ảnh hưởng đến chức năng của ống.
- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn dùng.
- Đây là sản phẩm chỉ sử dụng một lần, không tái tạo hoặc tái sử dụng lại sản phẩm.
- Các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện khi loại bỏ sản phẩm và việc loại bỏ sản phẩm phải được thực hiện theo quy định hiện hành cấp quốc gia về chất thải nguy hại sinh học.

#### CÁC PHẢN ỨNG BẤT LỢI

Các phản ứng bất lợi được báo cáo bao gồm: trào ngược axit sau khi thực quản co thắt, sự hít vào phổi, mất nước, căng tức, khô miệng và môi, mất cân bằng điện giải, viêm thực quản, đau họng, đặt ống nội khí quản và chấn thương niêm mạc họng-thực quản-dạ dày vv.

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Mở bao bì và lấy ống ra.
- Luồn ống qua khoang miệng đến dạ dày. Trong khi luồn, hãy chú ý đến điểm đánh dấu trên ống để đảm bảo vị trí luồn. Nếu cần, sử dụng chụp X quang để đảm bảo đúng vị trí.
- Kết nối đầu nối với thiết bị hút.
- Lựa chọn áp suất, điều chỉnh máy để hút chất chứa trong dạ dày

#### CHÚ Ý:

- Chỉ sử dụng một lần.

- Sản phẩm vô trùng nếu bao bì còn nguyên vẹn và không bị hư hại.
- Bảo quản ở nơi khô ráo, mát.



Giữ khô



Hạn sử dụng



Ngày sản xuất

LOT

Số lô



Không tiết trùng lại



Nhà sản xuất



Tránh ánh nắng trực tiếp



Không sử dụng lại



Không sử dụng nếu bao bì đã bị hỏng