

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA

Model: PKLPPC 200U

Hãng sản xuất: Paramedical srl

Nước sản xuất: Italy

----o0o---



A. KHỞI ĐỘNG MÁY:

Mở công tắc nguồn điện → Chờ 15 giây trên màn hình sẽ hiển thị bảng Menu chính
Tiếp tục chờ 15 phút để hệ thống quang học và nhiệt độ ổn định trước khi chạy mẫu.

B. THAO TÁC CHẠY MẪU:

Trên Menu Chọn số (1)(Item Test) → Chờ màn hình hiển thị danh mục test.

Chọn số hạng mục xét nghiệm tương ứng với test cần làm như (GLUCOSE, URE, CREATININ...)

→Enter.

Xuất hiện màn hình Item Name → cho nước cất vào cần hút mẫu ấn phím F2(Wash) từ 2-3 lần để rửa máy trước khi chạy mẫu.

Sau đó ấn phím F1 (Run) để vô màn hình chạy mẫu → chờ xuất hiện chữ Pump Water Please → Cho nước cất vào cần hút mẫu → Ấn nút Star(màu xanh phía sau cần hút mẫu) để chạy ống Blank → chờ 15giây để máy hoàn tất công việc chạy Water Blank.

Sau đó chờ màn hình xuất hiện chữ Pump Sample Please → cho mẫu vào cần hút mẫu → ấn Start → chờ kết quả.

Lưu ý:

- Phím ESC là phím thoát khỏi màn hình để chuyển sang chạy hạng mục khác.
- ở mục ITEM SELEST phím F4 là Pg up(chuyển lên), phím F5 là PgDn (chuyển xuống)
- Sau khi chạy hết mẫu của hạng mục xét nghiệm đó, sử dụng ta lấy nước cất hoặc dung dịch rửa → Chọn Wash để vệ sinh đường ống.

C. THAO TÁC Calibration máy:

Trên Menu Chọn số (1)(Item Test) → Chờ màn hình hiển thị danh mục test.

Chọn số hạng mục xét nghiệm tương ứng với test cần làm như (GLUCOSE, URE, CREATININ...)

→Enter.

Ấn phím F4 là Pg up(chuyển lên) hoặc phím F5 là PgDn (chuyển xuống) tìm mục Standard → cài trị số Standard vào → tìm chữ Factor sửa lại bằng 0 → Sau đó chọn Run → Máy sẽ kêu chạy Standard đầu tiên → Sau đó chạy mẫu.