

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA

Model: PKLPPC 300N

Hãng sản xuất: Paramedical srl

Nước sản xuất: Italy

----o0o---



1. **Mở máy:** Mở công tắc nguồn máy PKL PPC 300N, (mở công tắc màu đỏ trước màu xanh sau).
Mở chương trình chạy mẫu PPC 300N. Gõ Password: 3112772

2. **Vệ sinh máy buổi sáng:**

C.Rine→Wash All Cuvettes. Hoặc chọn wash từ 1-120, khi rửa máy xong là ta có thể chạy mẫu.

3. **Chạy Mẫu:**

Vào Routine →Entry→Nhập tên ở mục name.

Sam.ID: số mẫu trong ngày.

Size os cup: nếu dùng tube máu thì ta chọn tube, nếu dùng cup thì ta chọn sample cup.

Size of cup: vị trí để mẫu trên mâm quay.

Chọn test cần chạy→ADD→TEST→CONTINUE→TEST.

Mẫu tiếp theo tương tự như trên.

4. **Xem kết quả:**

Vào mục Register→chọn mẫu cần xem ở mục sample ID List

Xem kết quả ở mục Result List

Tùy chỉnh kết quả nhấn vào nút Evaluate→nhập vào mục cần chỉnh, chỉnh xong nhập vào mục Evaluate để xác nhận, thoát ta ấn phím Return.

Tìm kết quả cũ ở mục Review →gõ ngày cần tìm ở mục test date.

5. **Khi máy bị trục trặc:Vào mục P.clean →Reset.**

6. **Cách Chỉnh factor:**

Vào mục Item →gõ 3113662 →Ấn Methodology → Click vào hạng mục cần chỉnh →nhập số vào chữ Factor → Save.

7. **Thao tác Calibration một điểm:**

Nếu chạy chuẩn không đạt ta vào mục sau để calibration lại theo thao tác như sau:

Standard and QC→Chọn test cần calibration ở mục Item→ADD→ đặt chuẩn calibration ở vị trí S1→Test

8.Vệ sinh máy:

C.Rine→Wash All Cuvettes. Cuối ngày C.Rine →Add water →xong ấn Return.