



D - P - Đ

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG

77 Trần Tấn , Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú , Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0286722267

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐIỀU KHIỂN TAY

MODEL: BL-BH11 (K/D); BL-BH21 (K/D); BL-BH31; BL-BH41; BL-BHR31; BL-BHR41

Hãng chủ sở hữu: B-Life Co., Ltd./ Đà Loan

Hãng sản xuất: Sigma-Care Development Co., Ltd/Đài Loan

Xuất xứ: Đài Loan



Giường sử dụng cho bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện, di chuyển bệnh nhân giữa các khoa phòng.

Thận trọng: làm sạch, lau giường bằng vải mềm, ẩm với chất tẩy rửa nhẹ. Không dùng các loại cước gây mòn, chất tẩy rửa ăn mòn mạnh như cồn, benzen...

- Trước khi điều khiển giường:

+ Bộ điều khiển phải được mở (ON).

+ Chân bàn phải được khóa (CLOCK).

- Điều khiển giường bằng các tay quay được gấp lại ở dưới tấm thanh chắn cuối giường dùng để nâng lưng, gối, duy chuyển giường lên, xuống và điều chỉnh nghiêng Trendelenburg và Trendelenburg ngược.

- Các phụ kiện chọn thêm: gắn trực tiếp vào giường khi cần thiết.