

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **DUNG DỊCH XỊT MŨI**

Chủng loại/mã sản phẩm: **HUTA**

1. THÀNH PHẦN

Purified water, Glycerin, Aloe Vera Leaf Extract (Chiết xuất lô hội), Sodium Chloride, Peppermint essential oil (Tinh dầu bạc hà), Potassium Sorbate, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil.

2. CÔNG DỤNG

- Làm sạch các tạp chất và dịch nhầy từ đường mũi, cải thiện hô hấp.
- Hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng và cảm lạnh.
- Tinh dầu bạc hà tạo cảm giác thông thoáng, dễ thở và mát dịu, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của mũi.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách dùng:

Đưa nhẹ vòi phun vào mũi cho vừa khít. Ấn nhanh gọn vòi xịt 3-6 lần vào mỗi bên mũi. Để dung dịch thừa chảy ra ngoài sau đó xì mũi.

Lặp lại 3-4 lần mỗi ngày hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết.

Lưu ý:

Sau mỗi lần sử dụng, rửa sạch đầu vòi xịt với nước nóng và lau khô.

Không tái sử dụng chai xịt, đầu xịt dưới mọi hình thức.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

5. BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

6. HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 04 tháng 05 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng