

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **XỊT HỌNG**

Chủng loại/mã sản phẩm: **HOSA HUTA**

1. THÀNH PHẦN

Purified water, Glycerin, Andrographis paniculata Extract (Dịch chiết Xuyên Tâm Liên), Syzygium Aromaticum Extract (Dịch chiết Đinh Hương), Glycyrrhiza uralensis Extract (Dịch chiết Cam Thảo), Perilla frutescens Extract (Dịch chiết Tía Tô), Zingiber officinale Extract (Dịch chiết gừng), Cetylpyridinium Chloride, Xylitol, Peppermint essential oil (Tinh dầu bạc hà), Potassium Sorbate, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Fragrance.

2. CÔNG DỤNG

Giúp làm sạch, làm dịu mát miệng họng, làm sạch răng miệng, khử mùi hôi miệng, giúp cho hơi thở thơm mát.

Hỗ trợ kháng khuẩn, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng: Ho, ngứa họng, đau họng, khàn tiếng, viêm họng... Hỗ trợ ngăn ngừa cảm cúm do vi khuẩn, virus gây ra..

Hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn, virus xâm nhập gây tổn thương vùng miệng họng.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách dùng:

Xịt trực tiếp vào miệng, họng, mỗi lần xịt 2-3 cái.

Sử dụng 3-4 lần/ ngày, hoặc dùng khi cổ họng đau rát, khó chịu.

Đối tượng sử dụng:

Người đang bị viêm đường hô hấp

Người bị viêm họng, các trường hợp do gió, ho khan.

Hoặc người bị ngứa họng, đau họng, khàn tiếng, khó nuốt.

Lưu ý:

Để xa tầm tay trẻ em

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

5. BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

6. HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 04 tháng 05 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hùng