

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ  
HOÁ CHẤT VÀ HOA MỸ PHẨM



Số: 0105/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2022

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**MÁY TẠO OXY DÙNG CHO BỆNH NHÂN**  
**Chủng loại: SD-01B, SD-03B, SD-03W, SD-05B, SD-05W**



**1. Mục đích sử dụng:**

- Sản phẩm được sử dụng để cấp cứu hồi sức, cung cấp khí oxy cho bệnh nhân, hô hấp, bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế, xe cứu thương.

**2. Hướng dẫn sử dụng:**

- Kiểm tra máy còn nguyên vẹn linh kiện, đảm bảo an toàn đủ điều kiện sử dụng.

- Kết nối các bộ phận trên thiết bị bao gồm: Bộ phận tạo ẩm: Tháo cốc tạo ẩm, thêm nước tinh khiết vào cốc theo vạch chỉ định, lắp lại cốc. Cắm đường dây dẫn vào vị trí cổng trên cốc lọc. Cắm nguồn điện và khởi động máy. Bệnh nhân có thể thở bằng máy ngay lập tức hoặc có thể chờ 20 phút để máy đạt độ oxy tinh khiết.

- Có thể điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn nút điều chỉnh thời gian trên máy. Máy có thể cài đặt hẹn giờ từ 0 đến 99 phút.
- Có thể tắt máy bằng cách tháo hết các thiết bị kết nối, nhấn nút tắt công tắc và rút nguồn điện.

### **3. Chống chỉ định:**

- Máy không được sử dụng với mục đích kéo dài sự sống.
- Tuổi thọ trung bình của máy khoảng 20.000 giờ.

### **4. Cảnh báo và thận trọng:**

- Thường xuyên bảo trì: Nếu màng lọc máy đã sử dụng hết 2000 – 3000 giờ hoặc màng lọc bị đen, hãy thay màng lọc mới,
- Ống nối đầu lọc bộ phận tạo âm nên thường xuyên được làm sạch để tránh việc bị tắc nghẽn gây giảm lưu lượng oxy.
- Lỗi phổ biến thường gặp : Sau khi bật máy, đèn vàng nháy và có tiếng báo hiệu, đây là hiện tượng lỗi nguồn. Cần kiểm tra nơi cung cấp nguồn điện và giắc cắm điện.
- Nếu máy tạo oxy không được sử dụng trong thời gian dài, nên kiểm tra và bật máy chạy 1 giờ mỗi tuần để đảm bảo máy còn hoạt động được.

### **5. Bảo quản:**

- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Lưu ý lượng khí Carbon Monoxide tạo ra, không được tạo ra lượng quá lớn.
- Trong trường hợp mất điện hoặc chập hỏng nguồn điện, bệnh nhân cần trữ sẵn nguồn cung cấp oxy thay thế (bình oxy, túi oxy ...).

TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2022  
Người đại diện hợp pháp của cơ sở

