

## ĐÈN SOI ĐÁY MẮT TRỰC TIẾP

**Hãng SX: Keeler**

*Hướng Dẫn Sử Dụng*

Khi ĐÈN SOI ĐÁY MẮT TRỰC TIẾP được sử dụng, các bước bật và tắt máy được tuân theo sự hướng dẫn sau.

Việc bật hoặc tắt máy không đúng quy trình có thể gây hư hỏng thiết bị.

### Bật máy

1. Kiểm tra xem đèn đã được lắp pin ↓ chưa.
2. Bật đèn bằng cách vận bánh lăn phía trên tray cầm tù từ từ theo chiều kim ↓ đồng hồ để kiểm tra năng lượng pin còn hay hết.
3. Soi đèn vào mắt bệnh nhân để thăm khám.

### Tắt máy

1. Vận bánh lăn phía trên tay cầm tù từ từ theo ngược chiều kim đồng hồ ↓ để tắt đèn.
2. Nhẹ nhàng đặt đèn vào hộp đựng sau khi sử dụng.

### ! CẢNH BÁO

- Luôn luôn thực hiện đúng theo các trình tự bật và tắt máy

❖ Nếu trong quá trình sử dụng có gặp sự cố, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật :

– 028. 62908200 –

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc



Warut Pangpomma