

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Khẩu trang y tế GR
Model: Good Health

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường, nơi tập trung đông người, các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng thẩm mỹ, môi trường công nghiệp độc hại.

1. Mở khẩu trang xác định đúng vị trí mũi và cằm, bề thanh tựa mũi tạo độ kín.
2. Chụp khẩu trang và điều chỉnh để mũi và cằm được che phủ hoàn toàn, kéo quai đeo vòng qua tai.
3. Tạo nếp xung quanh sống mũi
4. Kiểm tra có khe hở không, điều chỉnh khẩu trang cho ôm khít khuôn mặt.

CHÚ Ý - CẢNH BÁO:

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn hoặc khi bao bì không còn nguyên vẹn.
- Tránh xa khu vực có lửa hoặc có nguy cơ bắt lửa.
- Không để sản phẩm nơi ẩm ướt và nơi có nhiệt độ cao

BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, ở nhiệt độ phòng.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT
GREEN SOLUTION JAPAN
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Đào Thị Hợi