

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Khẩu trang y tế GR6D
Model: Dr.Blux

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường, nơi tập trung đông người, các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng thẩm mỹ, môi trường công nghiệp độc hại.

- Mở nếp gấp để tạo một góc 120^0
- Điều chỉnh khẩu trang để mũi và cằm được che phủ hoàn toàn, kéo quai đeo vòng qua tai.
- Tạo nếp xung quanh sống mũi
- Kiểm tra có khe hở không, điều chỉnh khẩu trang cho ôm khít khuôn mặt.

CHÚ Ý - CẢNH BÁO:

- Không sử dụng sản phẩm hết hạn hoặc khi bao bì không còn nguyên vẹn.
- Tránh xa khu vực có lửa hoặc có nguy cơ bắt lửa.
- Không để sản phẩm nơi ẩm ướt và nơi có nhiệt độ cao

BẢO QUẢN:

bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, ở nhiệt độ phòng.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT
GREEN SOLUTION JAPAN
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Đào Thị Hải