

## Hướng dẫn sử dụng

### Ống soi tai mũi họng

**Chủng loại/mã sản phẩm:** Φ4

#### Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Kết nối một đầu của ống soi vào camera soi Tai, mũi, họng.

Bước 2:

+ Đưa ống soi vào mũi, sát sàn mũi theo hướng từ trước ra sau đối với soi xoang.

+ Đưa ống soi tư thế thẳng theo trục ống tai ngoài quan sát ống tai ngoài, màng nhĩ, cán búa đối với soi tai.

+ Đưa ống soi nhẹ nhàng vào họng trên bề mặt lưỡi theo hướng từ ngoài vào trong; lần lượt quan sát bề mặt lưỡi, lưỡi gà, eo họng, hai amidan, đáy lưỡi thanh nhiệt, xoang lên hai bên, thanh môn, sụn phễu và dây thanh đối với nội soi họng, thanh quản

#### Chống chỉ định:

Theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa

#### Cảnh báo và thận trọng:

Không để vật nặng đè lên hộp

Hoạt động ở nhiệt độ phòng

Tránh va chạm, làm rơi

**Nhà nhập khẩu và phân phối:** Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiết bị y tế Sao Việt

**Địa chỉ:** Số 40, Đường 130 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

*Phạm Hồng Nam*