

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

**Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú**

**Địa chỉ: Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành Phố. Hà Nội**

**Điện thoại: 0936618203**

Ngày 11. tháng 08 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Ghế răng đơn giản SDC-32S khung inox, SDC-32P khung thép sơn tĩnh điện là một thiết kế mới cho việc điều trị nha khoa, đem lại sự thuận tiện cho nha sĩ và bệnh nhân. Ghế có thể điều chỉnh độ cao, và góc xoay, tựa lưng. Đèn khám dùng đèn LED tuổi thọ lâu linh động điều chỉnh các hướng,
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Ghế gồm 01ghế chính, 01 đèn LED, 01 khay đựng dụng cụ, 01bát nhỏ , 01 dây nguồn liền ghế. Bao bì gỗ/carton
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Mục đích sử dụng để khám, điều trị răng
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p><b>HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT</b></p> <p><b>Bước 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp tựa lưng vào thân bằng 02 con chốt Ø8 x 30 và cài bằng chốt chẻ 3.</li> <li>- Tựa đầu được điều chỉnh độ cao bằng hoa mai M6 x 30.</li> <li>- Tựa đầu được điều chỉnh góc nghiêng bằng núm Ø4.</li> <li>- Thanh chống được lắp chốt Ø6 x 30 và cài bằng chốt chẻ 2.</li> </ul> <p><b>Bước 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp tay vịn vào thân bằng 02 con vít M6 x 25.</li> <li>- Lắp tay vịn vào thân bằng 02 hoa mai M6 x 25.</li> </ul> <p><b>Bước 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp cần đèn vào thân bằng 01 con vít M6 x 10 và 02 con vít M6 x 15.</li> </ul> <p><b>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh độ cao ghế răng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Một tay nâng tại vị trí 1.1, tay kia giữ chặt tại vị trí 1.2 và điều chỉnh độ cao thích hợp.</li> </ul> </li> <li>- Điều chỉnh độ nghiêng ghế răng:</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Độ nghiêng ghế răng được điều chỉnh bằng thanh chống số 1.3.</li> <li>- Điều chỉnh đệm đầu ghế răng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đệm đầu ghế răng 1.4 được điều chỉnh bằng tháo lỏng hoa mai và di chuyển đến vị trí thích hợp.</li> </ul> </li> <li>- Điều chỉnh đèn ghế răng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đèn ghế răng 1.5 được điều chỉnh bằng cách chỉnh cần đèn theo góc thích hợp.</li> </ul> </li> </ul>
1.5	Chống chỉ định	Không áp dụng
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Lắp đặt và sử dụng trên nền phòng bằng phẳng, khô ráo, kết nối ổ điện chắc chắn an toàn. Khi di chuyển phải rút điện ra khỏi nguồn điện.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có thông tin
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước	.Không có
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	.Không có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	Không áp dụng

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

*Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)*

*Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số*



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Phương Mai*