

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế răng đơn giản SDC-32S / SDC-32P




GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Phương Mai

1. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1:

- Lắp tựa lưng vào thân bằng 02 con chốt Ø8 x 30 và cài bằng chốt chẻ 3.
- Tựa đầu được điều chỉnh độ cao bằng hoa mai M6 x 30.
- Tựa đầu được điều chỉnh góc nghiêng bằng núm Ø4.
- Thanh chống được lắp chốt Ø6 x 30 và cài bằng chốt chẻ 2.

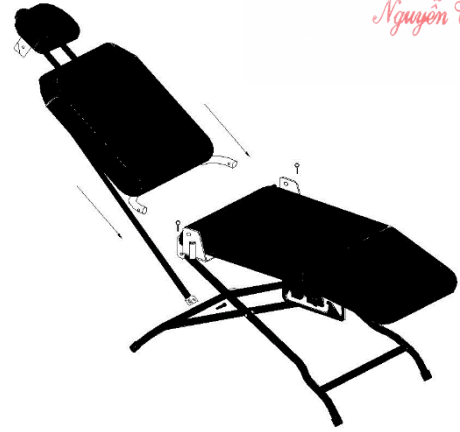

Bước 2:

- Lắp tay vịn vào thân bằng 02 con vít M6 x 25.
- Lắp tay vịn vào thân bằng 02 hoa mai M6 x 25.



Bước 3:

- Lắp cần đèn vào thân bằng 01 con vít M6 x 10 và 02 con vít M6 x 15.



2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Điều chỉnh độ cao ghế răng:
 - + Một tay nâng tại vị trí 1.1, tay kia giữ chặt tại vị trí 1.2 và điều chỉnh độ cao thích hợp.
- Điều chỉnh độ nghiêng ghế răng:
 - + Độ nghiêng ghế răng được điều chỉnh bằng thanh chống số 1.3.
- Điều chỉnh đệm đầu ghế răng:
 - + Đệm đầu ghế răng 1.4 được điều chỉnh bằng tháo lỏng hoa mai và di chuyển đến vị trí thích hợp.
- Điều chỉnh đèn ghế răng:
 - + Đèn ghế răng 1.5 được điều chỉnh bằng cách chỉnh cần đèn theo góc thích hợp.

