

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EUGENOL

Mô tả sản phẩm: Phản ứng với oxit kẽm tạo thành xi măng tạm thời để băng răng làm dịu cơn đau hoặc lót dưới phục hồi nhựa không composite.

Thành phần: Eugenol.

Chỉ định: Làm xi măng tạm thời kết hợp với Oxit kẽm.

Hướng dẫn sử dụng: Nhỏ một giọt lên bông gòn và nhẹ nhàng thoa lên vùng da bị viêm. Trộn với kẽm Oxit để tạo thành một hỗn hợp đặc sệt và đặt vào khoang răng hoặc như một lớp băng ở răng bị đau hay như lớp lót dưới phục hình bằng nhựa không composite.

Cảnh báo: Có thể gây kích ứng, phỏng hoặc mẫn cảm khi tiếp xúc với da. Nếu bị dính vào da, lập tức lau sạch kỹ lưỡng bằng bông và cồn, sau đó rửa thật sạch với xà phòng và nước. Nếu xảy ra tình trạng da bị phát ban, mẫn cảm hoặc phản ứng dị ứng khác, ngừng sử dụng sản phẩm và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Nếu sản phẩm dính vào mắt, rửa kỹ bằng nước sạch và hỏi ý kiến bác sĩ.

Chống chỉ định: Chống chỉ định sử dụng sản phẩm cho bệnh nhân có tiền sử phản ứng dị ứng nghiêm trọng với Eugenol.

Các biện pháp phòng ngừa: Tránh tiếp xúc với mắt. Ước chế sự trùng hợp của nhựa composite và không nên được sử dụng làm lớp băng trước khi đặt phục hồi bằng nhựa composite.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ từ 10°C đến 24°C. Đậy kỹ nắp sau khi sử dụng. Tránh nơi ẩm thấp. Hạn sử dụng không bị ảnh hưởng sau khi mở nếu được bảo quản ở nơi khô mát.

Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Hình thức đóng gói:

Ref: 40016 Chai thủy tinh 15ml x 1, Ống nhỏ giọt x 1

Ref: 40017 Chai thủy tinh 30ml x 1, Ống nhỏ giọt x 1

Ref: 40018 Chai thủy tinh 110ml x 1, Ống nhỏ giọt x 1

Điều kiện thải bỏ: Được xử lý dựa trên các quy tắc hiện hành của quốc gia nơi nó được sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Giám đốc

Lê Xuân Vinh