

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZINC OXIDE

Mô tả Sản phẩm:

Bột kẽm oxit phản ứng với Eugenol để tạo thành xi măng hoặc lớp lót nha khoa làm dưới phục hồi nhựa không composite.

Thành phần: Oxit kẽm nguyên chất

Chỉ định: Zinc Oxide được sử dụng để làm xi măng tạm thời kết hợp với eugenol.

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn với Eugenol để tạo thành một hỗn hợp đặc và đặt vào chỗ sâu răng hoặc đắp lên chỗ răng bị đau hoặc làm lớp lót dưới phục hình bằng nhựa không composite.

Cảnh báo:

Tránh tiếp xúc lâu dài hoặc lặp lại với da (viêm da tiếp xúc dị ứng), và mắt. Tránh hít phải lâu dài. Không dùng bên trong. Tiếp xúc với da có thể gây kích ứng, bỏng do mẫn cảm. Nếu xảy ra tiếp xúc với da ngay lập tức lau kỹ bằng bông và cồn, sau đó rửa kỹ bằng xà phòng và nước. Nếu da phát ban và mẫn cảm hoặc xảy ra phản ứng dị ứng khác, ngưng sử dụng sử dụng và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Nếu sản phẩm tiếp xúc với mắt, rửa kỹ bằng nước ngọt và hỏi ý kiến bác sĩ. Không sử dụng sản phẩm với những bệnh nhân có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào.

Các biện pháp phòng ngừa:

Tránh tiếp xúc với mắt. Ưc chế sự trùng hợp của nhựa composite khi sử dụng với Eugenol và không nên sử dụng như một loại băng trước phục hồi nhựa composite.

Bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ từ 10°C đến 24°C. Đậy kỹ nắp sau khi sử dụng. Tránh xa nơi ẩm ướt. Hạn sử dụng không bị ảnh hưởng sau khi mở nếu được bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát.

Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Quy cách:

Ref: 40028 Quy cách: Hộp nhựa 110g x 1.

Điều kiện thải bỏ: Được xử lý dựa trên các quy tắc hiện hành của quốc gia mà nó được sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Lê Xuân Vinh