

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỌC KHUẨN

- Ngăn chặn vi-rút, vi khuẩn, nhiễm khuẩn chéo từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác khi sử dụng máy giúp thở, máy đo chức năng hô hấp.
- Vật liệu bên ngoài nhựa y tế; màng bọc bên trong ngăn chặn vi-rút, vi khuẩn 99.999%.
- Dùng với máy giúp thở: Một đầu gắn vào dây dẫn khí (dây thở), một đầu gắn vào ống nội khí quản hoặc co nối,
- Dùng cho máy đo chức năng hô hấp: Một đầu gắn vào thân máy, đầu còn lại để bệnh nhân ngậm để thổi.

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Huệ Chi