

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**BĂNG BÓ BỘT THỦY TINH**

**1. Chỉ định:**

Sản phẩm được sử dụng để cố định tạm thời gãy xương, bong gân và biến dạng; Tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác.

**2. Thành phần:**

Vải đúc sợi thủy tinh, vải polyester tấm nhựa polyurethane.

**3. Bảo quản:**

Tránh để sản phẩm bị hở, tiếp xúc với không khí bên ngoài.

**4. Hướng dẫn sử dụng:**

- Chọn sản phẩm theo kích thước mong muốn và lấy ra khỏi túi bạc.
- Nhúng sản phẩm vào nước mát (18°C - 30°C), bóp 2-3 lần dưới nước cho sản phẩm thấm hoàn toàn.
- Cuộn hoặc gấp sản phẩm lại và vắt ráo.
- Đặt sản phẩm lên khăn rồi cuộn sao cho vừa vặn và vắt để loại bỏ nước còn sót lại.
- Dán sản phẩm lên vùng mà bệnh nhân mong muốn và quấn bằng dây thun. Lúc này việc tạo khuôn và định hình sẽ được thực hiện. Thời gian định hình xấp xỉ 3-4 phút. Sau 20 phút thì băng bó sẽ cố định hoàn toàn.

**5. Cảnh báo và thận trọng**

- Chưa có báo cáo phản ứng bất lợi liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.
- Chú ý phải sử dụng găng tay y tế khi tiếp xúc với sản phẩm vì nhựa polyurethane sẽ dính vào tay & quần áo gây bẩn, khó rửa sạch;



- Nếu lớp lót tiếp xúc với da đang ở trạng thái ướt thì cần dùng khăn thấm khô hoặc máy sấy khô cẩn thận. Nếu lớp lót này thường xuyên bị ướt hoặc không khô được có thể gây nên những biến chứng khác;
- Sản phẩm này cho phép bệnh nhân vận động dễ dàng hơn các loại sản phẩm truyền thống, do vậy cần cảnh báo bệnh nhân tránh lạm dụng hoạt động trong thời kỳ băng bó;
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Không để sản phẩm gần lửa; Để xa tầm tay của trẻ em.

**CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM**

**GIÁM ĐỐC**



**TRẦN KỸOUNGHO**

