

NỘI DUNG TIẾNG VIỆT TRÊN NHÃN CỦA SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Băng bó bột thủy tinh

Model: Optima Splint Fiberglass

Mã sản phẩm: OSF600

Chỉ định: Sản phẩm được sử dụng để cố định tạm thời gãy xương, bong gân và biến dạng; Tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác.

Thành phần: Vải đúc sợi thủy tinh, vải polyester tấm nhựa polyurethane.

Hướng dẫn sử dụng: 1. Chọn sản phẩm Optima Splint theo kích thước mong muốn và lấy ra khỏi túi bạc.

2. Nhúng sản phẩm vào nước mát (18 – 30 độ C), bóp 2-3 lần dưới nước cho sản phẩm thấm hoàn toàn.

3. Cuộn hoặc gấp sản phẩm lại và vắt ráo.

4. Đặt sản phẩm lên khăn rồi cuộn sao cho vừa vặn và vắt để loại bỏ nước còn sót lại.

5. Dán sản phẩm lên vùng mà bệnh nhân mong muốn và quấn bằng dây thun. Lúc này việc tạo khuôn và định hình sẽ được thực hiện. Thời gian định hình xấp xỉ 3-4 phút. Sau 20 phút thì băng bó sẽ cố định hoàn toàn.

Hướng dẫn bảo quản: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, tránh để sản phẩm bị hở, tiếp xúc với không khí bên ngoài.

Số lưu hành:.....

Chủ sở hữu số lưu hành, nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên nhà sản xuất: Joint Enterprise Co., Ltd.. Địa chỉ: 45, Gyeonggidong-ro, Namsa-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

Xuất xứ: Hàn Quốc

Ngày sản xuất: xem trên nhãn

Hạn sử dụng: xem trên nhãn

Số lô: xem “lot” trên nhãn



Tên sản phẩm: Băng bó bột thủy tinh

Model: Optima Splint Fiberglass

Mã sản phẩm: OSF630

Chỉ định: Sản phẩm được sử dụng để cố định tạm thời gãy xương, bong gân và biến dạng; Tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình khác.

Thành phần: Vải đúc sợi thủy tinh, vải polyester tấm nhựa polyurethane.

Hướng dẫn sử dụng: 1. Chọn sản phẩm Optima Splint theo kích thước mong muốn và lấy ra khỏi túi bạc.

2. Nhúng sản phẩm vào nước mát (18 – 30 độ C), bóp 2-3 lần dưới nước cho sản phẩm thấm hoàn toàn.

3. Cuộn hoặc gấp sản phẩm lại và vắt ráo.

4. Đặt sản phẩm lên khăn rồi cuộn sao cho vừa vặn và vắt để loại bỏ nước còn sót lại.

5. Dán sản phẩm lên vùng mà bệnh nhân mong muốn và quấn băng dây thun. Lúc này việc tạo khuôn và định hình sẽ được thực hiện. Thời gian định hình xấp xỉ 3-4 phút. Sau 20 phút thì băng bó sẽ cố định hoàn toàn.

Hướng dẫn bảo quản: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, tránh để sản phẩm bị hở, tiếp xúc với không khí bên ngoài.

Số lưu hành:.....

Chủ sở hữu số lưu hành, nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên nhà sản xuất: Joint Enterprise Co., Ltd.. Địa chỉ: 45, Gyeonggidong-ro, Namsa-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

Xuất xứ: Hàn Quốc

Ngày sản xuất: xem trên nhãn

Hạn sử dụng: xem trên nhãn

Số lô: xem “lot” trên nhãn



CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC



KYOUNGHO JANG