


TẤM TRẢI ĐA NĂNG AMETHYST

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

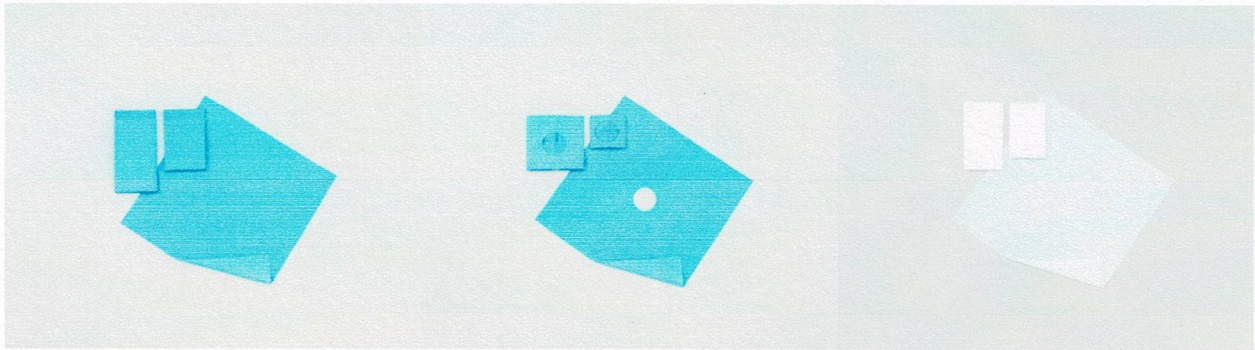

#814

#818

#914

TÊN SẢN PHẨM: Tấm trải đa năng Amethyst

I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Trải trên giường bệnh, bàn khám, bàn dụng cụ hoặc trải lên các vật dụng khác để hút chất lỏng (dịch, máu, hóa chất) để tránh lây nhiễm vào cơ sở y tế.

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có.

III. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Khi tấm trải bị quá ướt thì cần thay tấm trải khác để tránh tình trạng viêm da cho người bệnh.
- Những vùng trên cơ thể dễ bị hoặc đã bị loét cần tránh tiếp xúc với tấm trải đã bị ẩm ướt.
- Không để bị ướt, bị ẩm.
- Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao, tránh tiếp xúc với các hóa chất.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trải phẳng tấm trải lên bàn mổ, giường bệnh nhân, bàn đặt dụng cụ... điều chỉnh vị trí cho phù hợp với mục đích sử dụng
- Sản phẩm dùng 1 lần, sau khi sử dụng cần được xử lý theo quy cách xử lý rác thải y tế



Cobes Industries (Hefei) Co., Ltd.

No. 39 Liaoyuan Road. Xingcheng Development Zone, Hefei, China 231600



Sugioaka Yoshihisa