

IMMULITE®

Probe Wash Module

PROBE WASH

SAO Y BẢN CHÍNH



Thanh sửa đổi chỉ ra những cập nhật đối với phiên bản trước

Mục đích sử dụng

Để sử dụng trong vận hành thường quy các Hệ thống IMMULITE® và các Hệ thống IMMULITE® 1000 - nhằm giảm thiểu nhiễm chéo thuốc thử bằng cách giảm tích tụ protein và lipid ở kim hút.

PHÓ GIÁM ĐỐC
TỔNG THỊ BÍCH TUYẾN

Thuốc thử

Thuốc thử	Mô tả	Bảo quản	Độ ổn định
IMMULITE® Probe Wash Module PROBE WASH			
PROBE WASH CONC	Chất lỏng, chứa: <ul style="list-style-type: none"> • Trikali orthophosphate • dung dịch đệm/chất ổn định 	15–28 °C Có thể sử dụng cho đến ngày hết hạn ghi trên nhãn nếu bảo quản ở điều kiện không mở nắp.	không áp dụng

PROBE WASH CONC: 10 x dung dịch đệm cô đặc, có chất tẩy rửa.

Độ ổn định trên hệ thống

Pha loãng 1:10 **PROBE WASH CONC** ổn định trong 30 ngày ở 15 đến 28 °C hoặc cho đến ngày hết hạn của **PROBE WASH CONC**.

Cảnh báo và thận trọng

Chỉ để sử dụng cho chẩn đoán *in-vitro*.

Đề dùng trong phòng thí nghiệm chuyên nghiệp.

Theo quy định 2017/746 của EU, bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra liên quan tới thiết bị đều sẽ được báo cáo với nhà sản xuất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nước thành viên EU nơi người dùng và/hoặc bệnh nhân thường ở.

Tờ thông tin về dữ liệu an toàn (MSDS/SDS) có sẵn trên siemens-healthineers.com/sds.



Nguy hiểm! **PROBE WASH CONC**

Thành phần nguy hiểm: Trikali orthophosphate (3,57 % [w/w]).

H318: Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

P280: Mang găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt/bảo vệ mặt. P305 + P351 + P338: NẾU RƠI VÀO MẮT: Rửa thật cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng ra, nếu có và dễ tháo. Tiếp tục rửa sạch. P310: Ngay lập tức gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ/thầy thuốc.

Chỉ sử dụng nước cất hoặc nước khử ion.

Tránh nhiễm khuẩn đường nước và chất lỏng.

Không sử dụng Dung dịch rửa đầu dò (LPWS) thay cho Dung dịch làm sạch đầu dò (LPMS).

Đổ bỏ các chất độc hại hoặc bị ô nhiễm về mặt sinh học theo các thông lệ của cơ sở của quý vị. Vứt bỏ tất cả các vật liệu theo cách an toàn và có thể chấp nhận được và theo đúng tất cả các yêu cầu của chính phủ.

Chuẩn bị thuốc thử

Dung dịch rửa đầu dò được cung cấp ở dạng cô đặc và phải được pha loãng trước khi sử dụng.

Pha loãng theo tỷ lệ 1/10: Trước khi sử dụng, chuyển hóa chất của một chai sang Bình chứa dung dịch rửa sạch, thêm 900 mL nước cất hoặc nước khử ion và trộn bằng cách đảo đi đảo lại *nhẹ nhàng*.

Quy trình

Vật liệu được cung cấp

REF	Nội dung
LPWS2	IMMULITE® Probe Wash Module PROBE WASH
	IMMULITE® Probe Wash Concentrate PROBE WASH CONC 2 × 100 mL

Vật liệu yêu cầu nhưng không được cung cấp

Mục	Mô tả
–	Nước cất hoặc khử ion không chứa chất bảo quản
Các thiết bị ^a , ví dụ như:	<ul style="list-style-type: none"> Hệ thống IMMULITE® Hệ thống IMMULITE® 1000

^a Tùy từng quốc gia mà có thể có hoặc không có máy phân tích.

















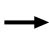







Hỗ trợ kỹ thuật

Bên ngoài Hoa Kỳ, liên hệ với Nhà phân phối quốc gia của bạn.

Hệ thống chất lượng của Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH được chứng nhận theo ISO 13485.

Định nghĩa các biểu tượng

Các biểu tượng sau có thể xuất hiện trên nhãn sản phẩm:

	Không tái sử dụng		Hạn sử dụng
	Mã lô		Số danh mục
	Thận trọng, hãy tham khảo các tài liệu đi kèm		Nhà sản xuất
	Đại diện được ủy quyền ở Cộng đồng châu Âu		Chứa đủ cho <n> xét nghiệm
	Rủi ro sinh học		Thiết bị y tế chẩn đoán <i>in vitro</i>
	Giới hạn nhiệt độ		Hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng
	Không vô trùng		Nhãn CE
	Dấu CE với số ID phần nội dung được thông báo. Số ID phần nội dung được thông báo có thể thay đổi.		Nội dung
	Thử tích sau khi hoàn nguyên		Mức
	Tránh ánh sáng mặt trời và nguồn nhiệt		Cảnh báo
	Nguy hiểm		Thiết bị dùng theo đơn (chỉ ở Hoa Kỳ)
	Mã vạch nhận biết thiết bị (UDI)		Số ủy quyền REACH

Thông tin pháp lý

IMMULITE là thương hiệu của Siemens Healthineers.

Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của nhãn hiệu đó.

© Siemens Healthineers, 2010–2021. Mọi quyền được bảo lưu.

Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com



Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76
35041 Marburg
Germany
siemens-healthineers.com