



BIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

XE LĂN Sử dụng trong các phòng khám, cơ sở khám chữa bệnh, trong gia đình sử dụng cho người tàn tật, người già bị thương chức năng ở chân, người suy giảm chức năng vận động

1. Mở xe lăn

Cầm tay cầm, nhẹ nhàng tách 2 bên khung xe lăn sang 2 bên. làm phẳng 2 bên gối kê bằng tay, Xe lăn sẽ mở 2 bánh xe sang 2 bên

2. Gấp xe lăn

Đóng bàn tựa chân, nhẹ nhàng nâng chỉnh giữa 2 phần đầu và cuối gối kê Xe lăn sẽ gấp lại

3. Điều chỉnh tựa lưng

Đối với các xe có bộ vệ sinh : Tại bộ phận ngồi : lấy tấm đệm ở giữa ra và có thể đi vệ sinh ngay tại xe lăn

4. Lên hoặc xuống xe lăn

Ngồi lên xe lăn: vui lòng phanh bánh xe lăn trước Giu tay cầm và ngồi xuống xe lăn 1 cách từ từ

Xuống xe lăn : Phanh bánh xe trước từ từ đứng lên và rời khỏi xe lăn

5. Đẩy và hãm xe lăn

Đẩy xe lăn : đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm, đẩy xe chậm chậm, chú ý phía trước

Hãm xe lăn : đứng ở cạnh xe lăn, 1 tay giữ 1 tay cầm, 1 tay hãm phanh, khóa phanh hãm