

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## MÁY KÍCH THÍCH TỬ XUYÊN SỌ

### MODEL: NEURO MS/D

#### 1. Khởi đầu nhanh

Trong chương này, bạn có thể tìm thấy các bước để thực hiện điều trị tiêu chuẩn với việc sử dụng của chương trình Neuro-MS.NET.

1. Nối cuộn dây với máy kích từ. Đảm bảo rằng đầu nối nguồn là được cắm chắc chắn và khóa lò xo đã được khóa.


2. Kết nối bộ kích từ với nguồn điện và cổng USB trên máy tính.

Bật máy kích từ. Để thực hiện việc này, hãy bật công tắc "Nguồn điện"

bằng điều khiển phía sau đến vị trí "I". Chỉ báo "Nguồn" trên bảng điều khiển phía trước sẽ sáng màu vàng.


3. Nếu bạn sử dụng hệ thống EMG và EP kỹ thuật số, hãy kết nối nó với cổng USB của máy tính.


4. Chạy chương trình Neuro-MS.NET (xem phần 2.4 "Chạy Neuro-MS.NET").

5. Nhấn nút  "Điều trị mới" của cửa sổ "Bắt đầu" hoặc sử dụng Điều trị | Mới...

([Ctrl + N]) lệnh menu chính.


6. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhập dữ liệu của bệnh nhân (xem 2.6 "Giai đoạn mới bắt đầu: Phân Điều trị Mới"). Nếu bạn thích sử dụng quy trình điều trị đặt trước, hãy chọn nó

với nút . Bạn có thể tìm thấy mô tả chi tiết của các giao thức trong 3 "Điều trị

Chương. nhấn nút 

7. Nếu bạn không chọn phác đồ điều trị khi bắt đầu điều trị, chương trình sẽ mở tab "Giao thức điều trị" và yêu cầu bạn tùy chỉnh liệu trình điều trị. Bạn có thể tìm cách tạo các giao thức điều trị trong 2.17.2

Phần "Các phác đồ điều trị".

8. Nhấp vào tab "MT". Tìm ngưỡng động cơ bằng nút  "Xung" và điều chỉnh

biên độ kích thích. Sửa nút sử dụng  MT. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong phần "MT" 2.9.





