



CÔNG TY TNHH LÊ LỢI

11/10 Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội.

T: 024.33825644 F: 024.33520915


Email: sales@leloimed.com.vn

Ngày 20 tháng 5 năm 2022

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY TRUYỀN DỊCH

Sản xuất bởi: Weifang KAWA Medical Products Co., Ltd.

Phân phối bởi: Công ty TNHH Lê Lợi

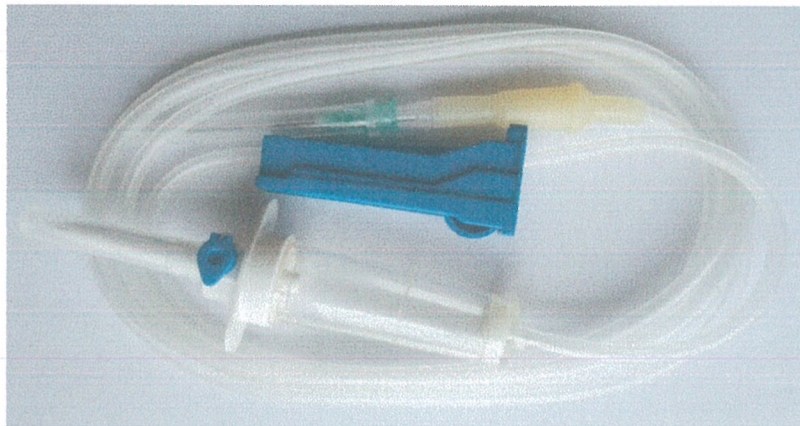

SỬ DỤNG KỸ THUẬT VÔ TRÙNG

- Đóng khóa điều chỉnh, tháo bỏ nắp bảo vệ đầu cắm nhựa.
- Cắm đầu kim vào chai đựng dung dịch thật chặt, không chạm trực tiếp vào đầu kim nhựa
- Bóp và nhả bầu lọc cho đến khi dung dịch chảy vào được 1/3.
- Tháo bỏ nắp bảo vệ ở bầu đếm giọt, mở con lăn khóa và đuổi hết khí trong dây.
- Đóng con lăn khóa để ngừng chảy dịch, không di chuyển con lăn cho đến khi dịch đã đến đáy bầu đếm giọt.
- Lắp đầu cắm nhựa của Dây truyền dịch với đầu kim truyền, bắt đầu điều khiển bằng cách điều chỉnh khóa con lăn đạt đến tốc độ dòng chảy mong muốn.
- Sau khi dùng xong, rút đầu nhựa cắm trong chai dịch ra khỏi nắp cao su của chai dịch.

Chú ý:

- Không sử dụng nếu bao bì đã mở hoặc bị hỏng:
- Không sử dụng nếu các nắp bảo vệ không nằm đúng vị trí.
- Chỉ sử dụng bằng trọng lực.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Anh

