



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B5, KCN Tam Điệp, TP Tam Điệp, Ninh Bình

Web: <http://www.mpv.vn> – Email: [info@mpv.vn](mailto:info@mpv.vn)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỐNG THÔNG DẠ DÀY

### I. Mục đích sử dụng của sản phẩm

- Ống thông dạ dày được ứng dụng trong các trường hợp lâm sàng khác nhau bao gồm mục đích đưa thức ăn, dẫn lưu và rửa dạ dày. Các ống này được đưa vào theo đường mũi-dạ dày đi tới dạ dày và được dùng để loại bỏ khí và chất lỏng.

### I. Hướng dẫn sử dụng

- Xé bỏ túi theo vết cắt đã đánh dấu. Lấy sản phẩm ra khỏi túi vô trùng.
- Bôi trơn ống thông bằng colostrum hoặc dung dịch parafin.
- Đưa ống thông vào qua lưỡi để tạo phản xạ nuốt.
- Trong trường hợp ống được đưa vào khí quản thay vì đưa vào thực quản (hiếm gặp) thì rút ống ra và thao tác lại.
- Chú ý vạch trên thân ống để đảm bảo đưa ống thông vào đúng vị trí, khi ống thông đã đi vào dạ dày, sẽ cảm nhận được có vật cản. Trong trường hợp cần thiết, có thể dùng hình ảnh X-quang để đảm bảo ống nằm đúng vị trí. Đo khoảng cách từ miệng đến dạ dày.
- Kết nối một đầu ống thông với máy thông dạ dày.

### II. Phương pháp lưu trữ và bảo quản

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp.
- Chú ý không làm bẹp hay gãy gập, cong sản phẩm.

### Chú ý:

- Không sử dụng khi bao gói bị hở, sản phẩm bị gập gãy, rò rỉ, rách, bẩn hoặc biến dạng.
- Không được sử dụng sản phẩm đã quá hạn sử dụng.
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần, cấm sử dụng lại.
- Cần thận trọng khi sử dụng với bệnh nhân có triệu chứng viêm nhiễm.
- Sau khi sử dụng, để phòng tránh việc truyền nhiễm phải xử lý vứt bỏ theo phương pháp an toàn cho dụng cụ y tế.
- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Hào*