

Yankauer- Dây hút phẫu thuật Hướng dẫn sử dụng

MÔ TẢ

Ống hút cứng Yankauer, có tay cầm, có lỗ ở đầu dạng thường hoặc tròn Crown để hút dịch trong quá trình phẫu thuật.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Sử dụng để hút dịch trong quá trình phẫu thuật kèm dây nối chiều dài tùy chọn để nối với hệ thống hút chung.

QUI TRÌNH

- 1- Mở bao gói
- 2- Kiểm tra bằng mắt thường đảm bảo không bị ướt, thủng, hở.
- 3- Nối giữa ống hút cứng với hệ thống dây hút trong phòng mổ.
- 4- Kiểm tra (test) để đảm bảo hệ thống hút hoạt động không bị tắc hoặc áp lực quá cao
- 5- Chính tốc độ máy thích hợp và vận hành máy hút.

LƯU Ý

- 1- Không sử dụng khi sản phẩm bị hỏng, hoặc đã bị mở trước đó, sử dụng 1 lần.
- 2- Đọc kỹ về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
- 3- Sản phẩm chỉ dùng 1 lần cho 1 bệnh nhân, Không tiết trùng và sử dụng lại.

Đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Thanh Thủy